




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Endo-SOLution 17% EDTA 50ml

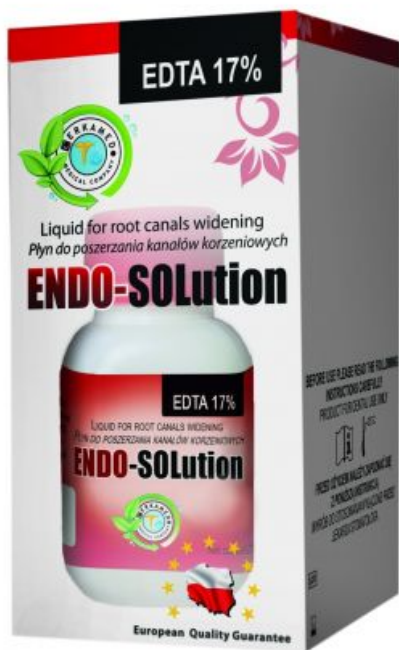

Pret:

36,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lichid pentru largirea canalelor radiculare

Substanta activa: 17% EDTA

Actiunea EDTA consta in reactionarea cu componentele minerale ale tesuturilor dure din dinte. Prin absorbtia in principal a calciului din canalul radicular, EDTA-ul inmoaie tesutul si face drenarea mecanica a canalului mai usoara.

Aplicatia si proprietatile ENDO-SOL

- Endo-Sol este folosit pentru curatarea mecanica a canalelor radiculare
- Ajuta in drenarea si curatarea canalelor, inlatura straturile alunecoase reveland canaliculele dentinare.
- EDTA-ul prezent in produs, prin curatarea ionilor de calciu si magneziu, cauzeaza inmuierea stratului superficial al dentinei asigurand curatarea si drenarea facila a canalului.

Instructiuni de folosire:

Pentru drenarea canalului radicular introduceti 2-3 picaturi de ENDO-SOL pe canal, in acelasi timp lucrând mecanic asupra lui pentru 30 de secunde. Clatiti cu ser fiziologic. Repetati operatiunea de cateva ori. Este recomandat ca folosirea Endo-SOL sa se faca impreuna cu Chloraxid (hipoclorit de sodiu).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- sticla 50 ml