



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigilant santuri si fosete Clinpro

Pret:

98,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material fotopolimerizabil care elibereaza fluor

Indicatii:

- Material fotopolimerizabil, eliberează fluor
- Utilizat pentru sigilarea șanțurilor și fosetelor
- Are la baza un indicator coloristic care permite vizualizarea ariei pe care a fost aplicat

Beneficii:

- Aplicare directa si usoara cu seringă in care este ambalat
- Are initial culoare roz iar prin fotopolimerizare se colorează în alb natural
- Vascozitate redusa, patrunde usor in santuri si fosete
- Contine si elibereaza fluor
- Adera de smalt



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Asigura o sigilare de lunga durata

Utilizare:

- Erupția dintelui trebuie să fie optimă
- Igienizați, uscați și demineralizați smalțul între 15-60 de secunde
- Spălați riguros cu apă
- Uscați smalțul demineralizat (acesta trebuie să aibă o colorație alb-mată)
- Injectați sigilantul în șanțuri și fosete
- Fotopolimerizați 20 de secunde, cu ghidul luminos cât mai aproape de sigilant fără a-l atinge
- Îndepărtați cu o buletă de vată stratul superficial, nepolimerizat

Prezentare:

- Seringa sigilant 1 x 1.2 ml, 10 varfuri negre