



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Resortin Kit (Analog Forfenan)

Pret:

119,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Resortin Kit este folosit pentru tratamentul și pentru obturarea antiseptică a canalelor radiculare infectate (pulpectomii parțiale)

Similaritati : Forfenan -Septodont

Mod de prezentare :

Lichid Terapeutic (sticla)- 5ml

Lichid Catalizator (sticla) – 5ml

Pulbere (cutie) – 10 gr

Lingura pentru masurare

Pad amestec

COMPOZITIE :



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Lichid Terapeutic cu continut de formaldehide ;
- Lichid Catalizator pentru intarire ;
- Pulbere - contine resorcinol,oxid de zinc,filler radioopac ,dioxid de titan si dexamethasona (0,01 %) care diminueaza reactia de durere ulterioara obturatiei de canal si accelereaza procesul de adaptare al materialului de umplere din apex.

Rezultatul amestecului lichidelor cu pulberea este o pasta moale care obtureaza complet canalul si care se intareste in 24 de ore. Rasina antiseptica resorcinol-formaldehida contine agenti de albire. Nu se recomanda inserarea pastei in cavitatea pulpara in spatele tesutului gingival ,datorita efectului de albire.

Resortin Kit este produs pentru folosirea in matrici biologice agresive cu temperaturi cuprinse intre 32-42 C (in cavitatea bucala la temperaturi 36-38 C si umiditate 60-90 %)

Instructiuni de folosire

Pentru tratamentul antiseptic dupa extractia pulpei si premedicatie ,canalul trebuie bine uscat cu Lichidul Terapeutic ,evitand scurgerile .

Pentru obturatia canalului se amesteca Lichidul Terapeutic (1 picatura) cu Lichidul Catalizator (1 picatura) in proportia 1:1.

Adaugati Pulbere (2 masuri) si amestecati timp de 1 minut .

Pasta trebuie introdusa in canal fara a parasi orificiul. Excesul de pasta va fi complet indepartat.

Dupa utilizare ,inchideti bine recipientele cu materiale ,folosite.

Depozitare : A se mentine la loc uscat si racoros (5-25 C).

Termen de expirare : 3 ani de la data manufacturarii.

Atentie: Evitati contactul cu ochii.In caz contrar clatiti cu multa apa si solicitati medicul de specialitate.

Efecte adverse : Daca conditiile de depozitare si transport sunt corespunzatoare si instructiunile de administrare sunt respectata ,nu exista efecte adverse.