




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Linguri de amprenta termofomabile set 6 buc

**Pret:**

**81,90 lei TVA inclusa**

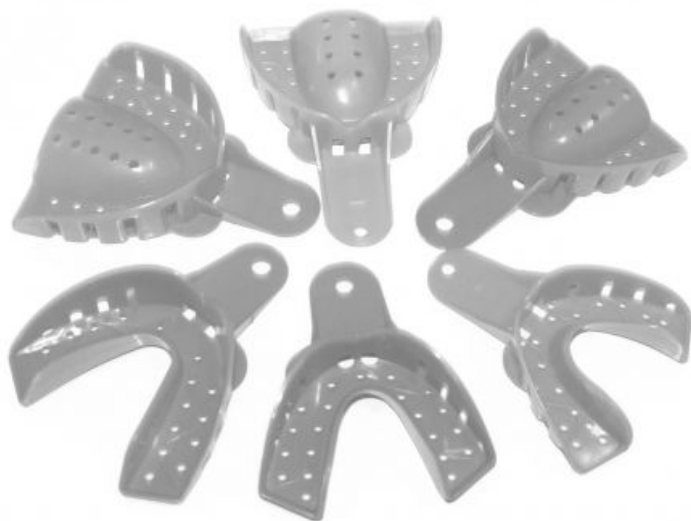

### Descriere produs:

Set de 6 linguri termofomabile, foarte usor de folosit si foarte de ajutor in procesul de amprentare.

1. Verificati ca lingura este curata
2. Imersati lingura in apa fierbinte (70-80 C) si tineti-o 10-20 secunde
3. Inlaturati lingura, ajustati marimea si unghiul marginilor dorite cu mana, in functie de statusul dentar al pacientului. Cand pacientul are dinti asimetrici sau dinti deformati, marimea portiunilor din lingura corespunzatoare va fi ajustata ca sa permita amprentarea precisa si usoara.
4. Plasati lingura de amprenta ajustata in gura pacientului si verificati daca pacientul o simte confortabil sau nu. Daca pacientul nu simte confortabil lingura, repetati pasii 2 si 3 si reajustati lingura pana cand pacientul este confortabil tinand lingura de amprenta in gura.
5. Injectati material de amprenta in lingura ajustata si luati amprenta.

### Prezentare

- set de 6 linguri termofomabile