



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

CresoTin



Pret:

230,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Mod de prezentare : Lichid (sticla)- 15ml

Contine : fenol,formaldehide – antiseptice .Actiunea lor are ca rezultat denaturarea proteinelor de microorganismе, fapt care furnizeaza proprietati antiseptice ,mumificare profunda si de asemenea sterilizarea canalului dentar.CresoTin lichid este produs pentru folosirea in matrici biologice agresive cu temperaturi cuprinse intre 32-42 C (in cavitatea bucala la temperaturi 36-38 C si umiditate 60-90 %)

Indicatii de utilizare:

- CresoTin lichid este un antiseptic folosit :
- - in tratamentul canalelor dentare infectate
- - tratamentul pulpitelor acute
- - ca agent antiseptic in timpul rezectiei apicale .

Avantaje :



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- actiune antiseptica puternica
- mumificare profunda
- sterilizarea completa a canalelor dentare
- reducerea semnificativa a durerii, actiune anti-inflamatoare si anti-alergica
- sticluta prevazuta cu pipeta

Instructiuni de folosire

Cresotin lichid se aplica utilizand conuri de hartie absorbante sau bulete(mese) inguste ,saturate in prealabil cu lichid si usor presate pentru a evita scurgerea in preparatie.Se lasa in orificiul canalului dentar sub un pansament temporar timp de 2-3 zile

Dupa aceasta perioada conurile sau buletele folosite se vor indeparta .Se recomanda sigilarea canalului steril cu Cresotin pasta .Dupa obturarea canalului este necesara izolarea cu ajutorul cimenturilor glasionomer si restaurarea coroanei dentare.

Efecte adverse :

Daca conditiile de depozitare si transport sunt corespunzatoare si instructiunile de administrare sunt respectata ,nu exista efecte adverse.

Depozitare : A se mentine la loc uscat si racoros (5-25 C).

Termen de expirare : 3 ani de la data manufacturarii.

Atentie: Evitati contactul cu ochii.In caz contrar clatiti cu multa apa si solicitati medicul de specialitate.