



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Calcipast 2,1 g

Pret:

**68,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

**Material pentru obturatia temporara a canalelor radiculare sub forma de pasta. Compozitie:** hidroxid de calciu, sulfat de bariu (CALCIPAST) sau iodoform (CALCIPAST I), substante auxiliare **Mod de prezentare:** seringa 2,1 g Material pentru obturatia temporara a canalului bazat pe hidroxid de calciu. Imbunatateste reconstruirea tesuturilor periapicale distruse. Componenta chimica aleasa cu grija asigura crearea rapida a dentinei recesive si reparative. Avantajul acestui produs este, in principal, efectul antibacterian de lunga durata si stimularea crearii barierelor mineralizate. Deasemenea, are si un efect sicativ, cu un rol important in cazurile de exudate inflamatorii persistente. **Aplicarea si proprietatile CALCIPAST**

- Dresing temporar pentru canale, folosit intre vizite
- Tratamentul canalelor radiculare infectate
- Efect antibacterian
- Amelioreaza efectul inflamatoriu
- Stimuleaza reconstruirea tesuturilor periapicale distruse in timp ce stimuleaza odontoblastul pentru a crea dentina reparatorie
- Protejeaza pulpa de stimulii termoelectrice
- Previne penetrarea exudatului in canalele radiculare
- Calcipast este un material moale, care nu se intareste, iar eliberarea controlata si de lunga durata a ionilor de calciu incepe imediat dupa plasarea in canal.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**Instructiuni de folosire** Produsul are o consistenta cremoasa ajutand la aplicarea usoara in canal cu ajutorul unui varf aplicator - acul Lentulo sau ultimul ac folosit pentru largirea canalului. Calcipast este folosit dupa prepararea si uscarea canalului.

1. Introduceti aplicatorul pana la 1/3 din deschiderea apexului
2. Apasati pistonul seringii pana cand pasta ajunge la apex, deschizand si retragand usor seringa
3. Indepartati excesul de pasta utilizand un pad steril.

Pasta ar trebui lasata in canal pana la reconstruirea partiala a osului. Calcipast contine sulfat de bariu radioopac, ceea ce duce la o vizibilitate foarte buna pe radiografie.