

## Hydrocal



Pret:

**32,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**Hidroxid de calciu pentru fabricarea pastei Mod de prezentare:** sticla cu 10 g Material sub forma de hidroxid de calciu pur, pudra, pentru prepararea obturatiilor radiculare temporare. Avantajul acestui produs este in principal efectul anti-bacterial de lunga durata si actiunea stimulanta pentru crearea barierelor mineralizate. Actiunea antibactericid sterilizand stratul de suprafata al pulpei, si in timp ce neutralizeaza mediul amelioraza reactia inflamatorie. Deasemenea stimuleaza tesutul pulpar pentru crearea dentinei secundare (crearea de punte de dentina in zona cu pulpa descoperita) si stimuleaza odontoblastul pentru a crea dentina reparatorie. Deasemenea are un efect siccativ care are un rol foarte important in cazurile de exudate inflamatorii persistente. Cauzeaza dizolvarea ramasitelor de pulpa dupa extirparea anestetica (efect desensibilizant) si dezolva resturile organice in canal in locurile in care instrumentele nu ajung. **Aplicatiile si proprietatile HYDROCAL:**

- Folosire in tandem cu apa distilata sau ser fiziologic
- Dresing temporar al canalului folosit intre vizite
- Tratamentul canalelor infectate
- Dresing de tratament pentru acoperirea indirecta a pulpei, stimuland crearea de punti de dentina
- Inlay bactericid pentru dezinfectarea canalelor in timpul tratamentului inflamatiilor ireversibile si a necrozei pulpei, precum si a inflamatiilor continue a tesuturilor periapicale
- Inlay pentru dezinfectarea canalelor in timpul tratamentului inflamatiilor ireversibile si a necrozei pulpei

- Obturatie temporara a canalului stimuland reconstruirea osului in timpul tratamentului inflamatiilor continue ale tesuturilor periapicale
- Filler permanent pentru canalul dintilor temporari
- Filler pentru canalul radacinilor rupte in alveola
- Filler pentru apexul radacinii in asanumita metoda de inchidere biologica a deschiderilor apexului

## **Instructiuni de folosire**

1. Amestecati hidroxidul de calciu cu un lichid la alegere pe o placuta de sticla pana la obtinerea consistentei cremoase
2. Introduceti produsul in canal utilizand un ac Lentulo sau ac de largire
3. Lasati pasta in canal: - in cazul canalelor infectate pentru aprox. 3 saptamani
4. -ca un dresing biologic pentru aproximativ 6 sapt - 3 luni, impreuna cu o obturatie provizorie sigilata (Total Blend)