




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Sare pentru curatare incinte 500g

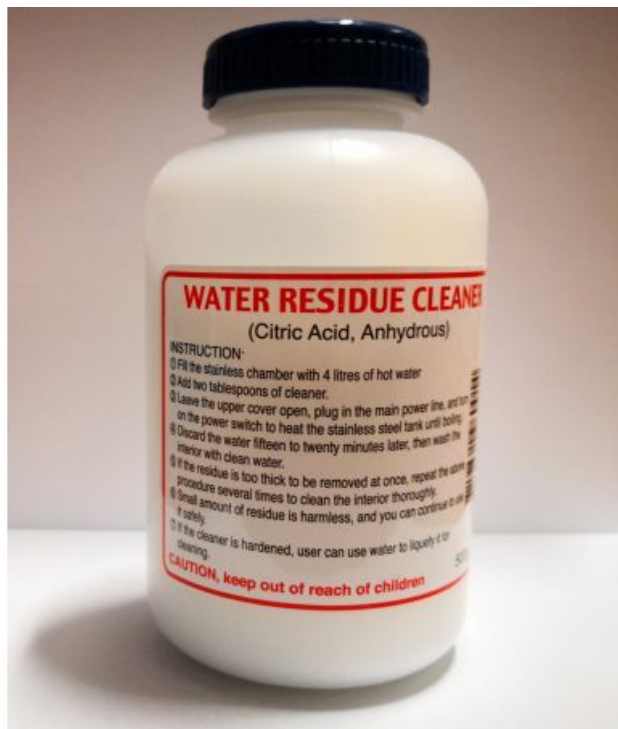

Pret:

**83,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

- Sare pentru curatarea incintelor distilatorului sau autoclavului de reziduurile de saruri/calciu lasate de apa dura.

### Mod de utilizare

- Turnati apa fierbinte in camera de inox pana la un nivel putin mai ridicat decat suprafata afectata
- Turnati 1-4 linguri (in functie de cantitatea de reziduuri depusa) in apa
- Porniti aparatul pentru a porni incalzirea camerei de inox insa nu acoperiti/inchideti camera de otel
- Aruncati apa dupa 15-30 de minute si spalati interiorul camerei de otel cu apa curata
- Daca nu s-a putut inlatura murdaria din prima operatiune, repetati toti pasii
- Reziduurile de substanta de curatare nu sunt periculoare pentru sanatate.

### Prezentare

- Compozitie: acid citric monohidrat
- Contine 500 g