



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sistem rotativ V-Taper Gold



Pret:

145,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sistem de ace cu conicitate progresiva proiectat cu aliaje metalurgice de precizie, având ca principal obiectiv o flexibilitate foarte bună și tăiere excelentă în canalele pre-lărgite.

Proiectate pentru a fi folosite prin aceeași tehnică de periere a pereților cu acele de preparare (shaping), asigurând astfel încrederea de a folosi acele de finisare pentru a obține curățarea și obturarea canalelor radiculare.

Sistem de ace similar și compatibil cu sistemul Protaper Gold - marca înregistrată Maillefer.

Tehnologie a acelor AF-R Wire pentru acele Shaping.

[Descarca broșura V-Taper Gold](#)

[Descarca instrucțiunile de utilizare](#)

Tehnologie de aliaj AF-R pentru acele de preparare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tehnologie de aliaj AF-H pentru acele de finisare

3 ace de preparare, 3 ace de finisare

Elasticitate înaltă a aliajului NiTi

Perfecte pentru prepararea canalelor radiculare curbate

Design special Variable Taper (Conicitate Variabilă) cu 6 ace

Endo Stop

Marchează precis lungimea canalului și identifică direcția de îndoire a acului

Profil triunghiular

Design triunghiular convex, pentru o mai bună capacitate de tăiere

Rotație continuă

Mișcare de rotație continuă

Setare motor: 350 rpm, 2.7 Ncm, rotatie forward.

Instrumente cu expansiune treptată

Viteza: 350 rpm

Cuplu: 2.0 Ncm

Tehnologia de aliaje Fanta AFTM

Fanta AFTM reprezintă un aliaj metalic cu proprietate intelectuală exclusivă, ce prezintă un tratament termic special și este folosit pentru producția acelor rotative endodontice.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fiecare sistem de ace rotative prezintă două caracteristici speciale, care îl individualizează: forma și designul sistemului de spire, precum și caracteristicile tehnice ale aliajului din care este fabricat.

După cum se știe, acele din oțel sunt rigide și astfel nepotrivite pentru instrumentarea porțiunii apicale a canalelor înguste și curbate. Aliajele NiTi prezintă proprietăți superioare în ceea ce privește ductilitatea, rezistența la îndoiri succesive, rezistența la rupere, rezistența la coroziune, precum și biocompatibilitatea.

Aliajul AFTM-Wire are la bază o versiune îmbunătățită, plecând de la aliaj clasiv NiTi, care, în mod ideal pentru lucrul în domeniul endodontic, prezintă capacități mecanice excelente. Flexibilitatea este suficient de mare pentru a permite pătrunderea pe canal și a evita perforarea acestuia, în același timp duritatea este suficient de mare pentru a avea o eficiență de tăiere cât mai mare.

Aliajul Fanta AFTM-Wire oferă 3 niveluri de flexibilitate din care să alegeți, care depind de fazele cristalografice respective care sunt prezente în aliaj. Ele sunt: AFTM-H, AFTM-R și AFTM-L.

Instructiuni de utilizare

În primul rând, permeabilizare până la lungimea de lucru cu un ac Kerr de 10. Creați o cale de acces glide path cu C-Path 1, 2 și 3.

Alternativ, după permeabilizarea cu Kerr de 10, creați o cale de acces (glide path) manuală cu Kerr 15 și Kerr 20.

Apoi folosiți S1 până la WL

Apoi folosiți S2 până la WL

Apoi verificați cu apex locatorul lungimea de lucru WL folosind un ac Kerr 20.

Apoi folosiți F1 până la WL

Apoi folosiți F2 până la WL

Opțional, în canale largi, folosiți F3 până la WL

(pachetul conține 6 instrumente) **21 mm 25 mm 31 mm Taper Dimensiune** SX ✓ 04 #19 S1 ✓ ✓ ✓ 02 #18 S2 ✓ ✓ ✓ 04 #20 F1 ✓ ✓ ✓ 07 #20 F2 ✓ ✓ ✓ 08 #25 F3 ✓ ✓ ✓ 09 #30 Asortate



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

√ √ √ -

-

Prezentare

Cutie cu 6 instrumente

Secventa completa (SX-F3) sau marimi individuale