



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Detergent Dezinfectant Incidin Pro 6L



Pret:

598,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Detergent dezinfectant Incidin Pro pentru unitati sanitare / suprafete mari / podele, Ecolab, 6 litri, cu aviz biocid

Cu aviz biocid

- Produs concentrat pentru suprafete.
- Nu contine aldehide. Produsul este avizat sanitar.
- Spectru larg de eficacitate cu timp de contact redus.

Eficacitatea antimicrobiana a Incidin Pro este completata de timpii de contact scazuti si compatibilitate excelenta cu materialele. Incidin Pro actioneaza puternic impotriva bacteriilor, levurilor si a virusurilor (inclusiv norovirus), Incidin Pro este recomandat pentru zone cu risc inalt si pentru o gama larga de suprafete, de la cabinete medicale si spatii publice pana la sali de operatii si sectii de terapie intensiva.

CARACTERISTICI



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Putere de curatare excelenta si compatibilitate cu materialele.
- A fost testat minutios pe toate tipurile de suprafete regasite in mod frecvent in spatiile medicale - de la metale, linoleum si obiecte din PVC pana la ceramica, plastic si cauciuc – obtinandu-se rezultate excelente.
- Conform standardelor de testare EN. Testele efectuate conform standardelor EN relevante pentru domeniul medical, au confirmat, pe baza celor mai noi metode DVV, spectrul larg de eficacitate al produsului Incidin Pro, inclusiv impotriva Norovirusului. A se vedea detalii in tabelul de mai sus. Formula fara aldehide, parfum si coloranti.
- Sistemul de ingrediente non-volatile si fara parfum asigura o utilizare comoda si mai ales sigura.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Diluati concentratul cu apa de calitate adecvata (max 30°C) pana la concentratia dorita.
- Umectati complet suprafata cu o cantitate suficienta de solutie si lasati sa se usuce.
- Pentru a obtine de ex. o solutie de 0,5% v/v preparati o dilutie 1:200 cu\ apa: 5ml de Incidin® Pro se adauga la 995ml de apa curata (potabila), si se obtine in total un volum de 1 litru.

Prezentare

- bidon 6 litri