



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Sekusept Aktiv dezinfectant instrumentar



**Pret:**

**224,99 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Produs concentrat pulbere pentru instrumentar medical termosensibil pe baza de acid peracetic

Indicat pentru curățarea și dezinfectia instrumentelor și dispozitivelor medicale termostabile și termolabile (instrumentar medical din metal, plastic, cauciuc, sticlă, echipamente medicale, accesorii de anestezie, incubatoare nou-născuți), inclusiv a endoscoapelor flexibile, în sectorul medical (spitale, cabinete medicale, policlinici, laboratoare, secții de ATI, secții de neo-natologie etc.)

Produsul nu se utilizează pentru dezinfectia instrumentarului nichelat sau din aluminiu.

Pentru dezinfectia instrumentarului se poate utiliza atât prin imersie cât și în băi cu ultrasunete.

Tipul preparatului: Pulbere albă, miros slab

Dezinfectant de nivel înalt potrivit pentru curatarea instrumentarului. Solutie activa 24-48h (recomandat 24h).

Indicații de folosire și dozaj:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Sekusept Aktiv se folosește sub formă de soluție de lucru. Soluția de lucru se prepară cu apă rece de la robinet. Se adaugă cantitatea necesară de produs pulbere în apă și se amestecă de câteva ori într-un interval de 15 min., până la dizolvarea completă. Soluția este acum gata de a fi utilizată. Produsul se poate utiliza la toate gradele de duritate a apei.

Dezinfectia instrumentarului medical, aparatelor de anestezie, protezelor dentare:

Imediat dupa utilizare, se introduc instrumentele medicale și garniturile de anestezie în soluția de lucru de concentrație recomandată. Instrumentele sau aparatele care se pot dezambla se desfac în elementele componente. Aveți grijă ca instrumentele să fie scufundate complet în soluția de lucru, evitând formarea de bule de aer. După timpul de acțiune recomandat, instrumentele se scot și se clătesc cu apă sterilă (in cazul dezinfectiei de nivel inalt) sau cu apă distilată (in cazul dezinfectiei de nivel scăzut).

## Dozaj

Soluție de concentrație 0,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv

Soluție de concentrație 1%: La 2 litri apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv.

Soluție de concentrație 1,5%: La 4 litri apa rece de la robinet se adauga 3 linguri 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv

Soluție de concentrație 2%: La 1 litru apa rece de la robinet se adauga o lingura 20 gr. pulbere Sekusept Aktiv.

## Prezentare

- galeata 1.5 kg