



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Dezinfectant Biocid de suprafete Klintensiv



**Pret:**

**35,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Iti doresti un cabinet sigur, fara microbi? Iti oferim acum dezinfectantul pentru suprafete gata de utilizare. Cu acest nou dezinfectant, puteti igieniza scaunele de tratament, suprafetele uniturilor dentare, piesele de mana (turbina, contraunghi, piesa dreapta), bratele de sustinere a lampilor, instrumentele stomatologice din otel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, dar si alte suprafete de lucru din spatii private sau zone de sanatate publica. Este o solutie cu proprietati dezinfectante, fara alcool, fara aldehide, cu un spectru larg de actiune biocida. Substantele active sunt sarurile cuaternare de amoniu. Recomandam acest produs pentru suprafete delicate si opacizante, sensibile la atacul chimic al solutiilor cu baza alcoolica. A fost creat conform reglementarilor europene privind dezinfectia. Mod de utilizare: Se pulverizeaza direct pe zona care necesita curatare sau dezinfectare si se distribuie uniform solutia activa peste intreaga suprafata si obiectele care trebuiesc dezinfectate (se poate utiliza o bucata de material textil netesut). Se lasa sa actioneze minim 5 minute. Nu necesita clatire. Substante active: Clorura de didecildimetilamoniu si saruri cuaternare de amoniu. Tipul de produs biocid conform legislatiei in vigoare (Regulamentul UE nr. 528/2012): Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide Tip de produs: 2 – Dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar si aeromicroflora cu aplicare prin ștergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în domeniul medical, industrial, institutional, colectivități, casnic. Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație Attentionari: A se folosi numai dupa ce au fost citite si intelese instructiunile de utilizare. Este recomandata depozitarea in spatii inchise, curate, bine aerisite, cu temperaturi cuprinse intre + 5 °C la + 30°C. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare, respectiv declaratia de conformitate intocmita pe baza fiselor tehnice, a



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

buletinelor de analiza si avizul sanitar. Denumirea chimica Nr. CE Nr. CAS Concentratie Clorura de didecildimetilamoniu 230-525-2 7173-51-5 0,34% Compusi de amoniu cuaternar,benzyl-C12-C18-alchildimetil, cloruri 269-919-4 68391-01-5 0,09%

Stergeti suprafata infectata cu o laveta inmuata in solutie dezinfectanta sau pulverizati solutia dezinfectanta peste suprafata contaminata si apoi stergeti cu o laveta umeda.

Tip dezinfectie Dozaj solutie Timp de actiune Nivel mediu si scazut nediluat 5 minute Nivel inalt nediluat 60 de minute

Modalitati de ambalare: 1000 ml cu pulverizator