

Ac curatare canal AF MAX 1

Pret:

24,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ac pentru curatarea canalului AF MAX 1

DESCARCA BROSURA AF MAX

DESCARCA INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE

Vârf inactiv

Conicitate maximă 0.04. Mărimea vârfului #25

Fabricare automatizată de înaltă precizie

Pentru curățarea și prepararea canalului

Endo Stop

Marchează precis lungimea canalului și identifică direcția de îndoire a acului

Super elasticitate și flexibilitate extremă

Stres minim aplicat pereților interiori

Curățare a canalului

Finisare excelentă după curățare

Înlătură eficient straturile bacteriene

Ac special cu conicitate maximă de 0.04

Cu cât folosiți acul de mai multe ori cu atât probabilitatea de izolare mecanică va crește și acul nu va mai

fi eficient. Curățarea și irigarea canalului este asigurată de acul de lucru și de apă. Acesta este un ac de lucru cu o conicitate maximă de 0.04 și este potrivit pentru curățarea și irigarea canalului. Acesta este un ac de lucru cu o conicitate maximă de 0.04 și este potrivit pentru curățarea și irigarea canalului.

Discrepanța nu va schimba forța de preparare a canalului radicular și a puterea cel mai bun efect de curățare, distrugând bacteriile în timp ce se salvează dintr-unu o proporție cât mai mare.

Viteza: 800 rpm

Cuplu: 1.0 Ncm

Instrucțiuni de utilizare

Este necesar să procesați acele după indicațiile de mai jos înainte de fiecare folosire, sterilizarea făcându-se la 126C pentru 30 de minute.

Instrucțiuni Pas-cu-Pas:

- 1) Sterilizare în autoclav la 126C pentru 30 minute;
- 2) Clatiti acele cu ser fiziologic (0.9% NaCl) timp de 10 secunde;
- 3) Uscati acele folosind seringă de aer de la unit;

1.Irigati canalul 2.Cu ajutorul unui apex locator, negociați canalul folosind un ac C-Path 10 cu o mișcare circulară până la lungimea de lucru, pentru a obține o cale de acces optimă. 3.Irigati canalul 4.Folosiți Max 3 până la lungimea de lucru cu o mișcare pecking de ușoară percuție (Mișcare Pecking: mișcare ușoară percuție - rotație înăuntru-afară canalului pe o adâncime de 3 mm) până când ajungeți la lungimea de lucru. Mișcarea acului este una de rotație (viteza: 800 rpm, cuplu 1 Ncm). 5.Irigati canalul 6.Pentru a asigura o mai bună curățare a treimii apicale, precum și atunci când folosiți irigarea și activarea ultrasonică a soluțiilor în canal, folosiți Max 1 în același mod și cu aceleași setări menționate la punctul 4. 7.Irigati canalul



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- 1 bucata Max 1
- varf #25