



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ufi Gel SC Set cartus 50ml+adeziv+glaze+accesorii

Pret:

980,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ufi Gel SC (permanent) este un material suplă pentru rebazari pe baza de silicon A.

Materialul Ufi Gel SC auto-polimerizabil cu priză la rece va garanta un mod de lucru simplu și rapid.

Setul conține un lichid adeziv pentru obținerea unei bune adeziuni între proteza și materialul de rebazare. Printre altele conține pasta de bază și catalizatorul precum și lichidul catalizator și bază (glazing) pentru finisarea suprafețelor polizate.

Indicatii:

- rebazari suple permanente ale protezelor
- material de captusire permanenta moale, pentru proteze partiale si integrale
- tratamentul punctelor de presiune
- imbunatatirea potrivirii si fixarii
- captusire pentru procese alveolare dure
- captusiri in domeniul implantologic
- readaptarea protezelor



Avantaje

- silicon de captusire de calitate superioara
- captusire completa intr-o singura sedinta (in cabinet)
- adeziv special pentru lipirea extrema a siliconului la proteza
- usor de folosit si economic
- biocompatibil (fara metacrilat)
- culoare si gust neutru
- culoare stabila, estetic, efect cameleonic
- uz de laborator: mai putini pasi decat cu alte materiale cu intarire la rece
- pentru toate protezele pe baza de PMMA
- aplicare simpla si rapida pentru toate captusirile directe si indirecte
- adaptare excelenta la detalii fine pentru potrivirea precisa a protezei
- rezistenta la agentii de curatare standard ai protezelor

Mod de aplicare

Curatati bine proteza cu ajutorul unei perii si uscati. Retentionati baza protezei si curatati-o cu alcool. Retentionati suprafetele vestibulare si linguale pe o inaltime de 3-4mm si rortunjiti marginile protezei. Aplicati un strat subtire de Ufi Gel SC adeziv pe suprafetele tratate la care Ufi Gel SC trebuie sa adere. Lasati sa actioneze aprox. 1 ora.

Ufi Gel SC ar trebui sa aiba o grosime de min.2 mm in locurile rebazate.

Necesarul Ufi Gel SC este:

- proteze maxilare intre 6-9 cm de baza si catalizator.
- proteze mandibulare intre 4-5 cm de baza si catalizator.

Rebazari in laborator:

Utilizati cantitati identice de Ufi Gel SC baza si catalizator si malaxati-le aprox. 1 min. Aplicati materialul malaxat cu spatula mai intai pe bordura linguala si apoi pe cea vestibulara.apoi acoperiti baza, izolati modelul de gips,fixat proteza in articulador si puneti-o impreuna cu articuladorul intr-un recipient de presiune (30-40 C) pentru o jumătate de ora.

Rebazari direct in cavitatea bucala

Acoperiti cu Ufi Gel SC toate zonele protezei ce se afla in contact cu tesaturile. Dupa aprox. 2 min. proteza



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

poate fi inserata in gura pacietului.

Pacientul trebuie sa inchida usor gura in ocluzia normala si sa o mentina in aceasta pozitie aprox. 2 min.
Se efectueaza miscari de masticatie si deglutitie timp de aprox. 2 min.

Dupa 7-10 min. proteza poate fi scoasa din gura.

Excesul de material poate fi inlaturat cu grija cu ajutorul unui instrument ascutit,foarfeca sau cutit de ceara.

Finisarea rebazarii:

- Pietre rugoase si polipanturi.

Prezentare:

- set cartus 50 ml
- adeziv 10 ml
- baza glazura 10 ml
- catalizator glazura 10 ml
- varfuri amestecare tip 8