



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Teethmate Desensitizer Set

Pret:

720,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Desensibilizant unic, cu precipitare de hidroxiapatita

Acest material reprezinta primul densensibilizant care ofera o solutie reala pentru tratarea sensibilitatii dentare. Kuraray Noritake a creat acest produs pentru a produce cel mai dur mineral din corpul uman - hidroxiapatita (HAp).

Mineralul nou-creat este biocompatibil, se comporta ca si cum ar fi fost produs de insusi corpul pacientului. Dar cum este posibila producerea de HAp? Totul sta in proportia potrivita intre ionii de calciu si de fosfat si pH-ul adecvat, totul realizat prin tehnologia speciala dezvoltata de Kuraray Noritake Dental.

Astfel, sensibilitatea dentara poate fi acum tratata cu incredere, prin inchiderea canaliculelor dentinare si a fisurilor din smalt.

Eficienta dovedita:

Intr-un studiu realizat de Kuraray Noritake Dental, medicii japonezi au fost rugati sa aprecieze eficienta acestui produs. Din cei 285 de participanti, 92% s-au declarat multumiti de eficienta materialului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Teethmate Desensitizer poate fi utilizat pentru a inchide dentina expusa si, de asemenea, inainte si dupa procedurile de albire dentara. Studiile au aratat ca aplicarea acestui produs este eficienta si inchide tubulii dentinari, reducand miscarea fluidelor dentinare, prin urmare micșorand si hipersensibilitatea.

Produsul este foarte usor de utilizat: trebuie doar sa amestecati pudra si lichidul timp de 15 secunde, aplicati pasta rezultata pe zona sensibila (unul sau mai multi dinti), asteptati aproximativ 30 de secunde, apoi clatiti usor cu apa.

Beneficii:

- primul desensibilizant care creeaza hidroxiapatita
- are gust neutru si este delicat cu tesuturile
- este usor de aplicat
- este invizibil si durabil

Indicatii:

- tratarea dentinei expuse in urma abraziunii realizate de periuta de dinti, din cauza retractiei gingivale, a afectiunilor parodontale si/sau a eroziunii acide
- tratarea suprafetei dintilor inainte si dupa albire
- tratarea dentinei preparate pentru obturatii sau/si restaurari protetice

Produsul nu afecteaza rezistenta adeziunii materialelor pentru restaurari dentare, ceea ce este un mare avantaj pentru medicii stomatologi.

Mod de prezentare:

Kit: pudra 6g, lichid 4.8ml, godeuri pentru amestec, lingurita pentru dozaj, aplicator

Desensitizer kit se poate utiliza pentru 130 de aplicari.