



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Express XT Putty Soft

Pret:

348,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Express™ XT este un material de amprenta polivinilsiloxan cu rezultate excelente de la prima amprentare obtinand restaurari indirecte cu inchidere marginala perfecta.

Indicatii:

- Amprente pentru coroane si punti.
- Amprente pentru inlay-uri si onlay-uri.
- Express XT este potrivit atat pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp (monofazica) in dublu amestec cat si pentru cea in doi timpi (tehnica de spalare).

Proprietati:

- Hidrofilie si proprietati de curgere superioare.
- Rezistenta foarte buna pentru evitarea deformatiilor.
- Revenire elastica buna dupa priza astfel incat se minimizeaza riscul aparitiei distorsiunilor la indepartarea amprentei din cavitatea orala a pacientului.
- Stabilitate dimensionala mai buna decat a alginatelor si a siliconilor de condensare.

Datorita acestor proprietati remarcabile, materialele de amprenta polivinilsiloxan Express™ XT sunt excelente pentru obtinerea amprentelor de mare fidelitate si a restaurarilor indirecte corecte.

Avantaje:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Stabilitate dimensionala superioara - permite pastrarea amprentei timp indelungat, nu prezinta modificari in primele 24 de ore, confirmand astfel stabilitatea dimensionala superioara si posibilitatea de depozitare pe termen lung;
- Nu sunt sensibile la umiditate
- Rigiditate foarte buna.

Mod de prezentare:

- 1 x 250 ml pasta baza + 1 x 250 ml pasta catalizator
- 2 linguri dozare.

3M ESPE – Experiență de peste 40 ani în amprentare În calitate de lider în domeniul materialelor de amprenta, firma 3M ESPE este renumita pentru calitatea si produsele sale inovatoare. De la lansarea primelor materiale de amprenta, in urma cu mai mult de 40 ani, 3M ESPE si-a imbunatatit si largit continuu portofoliul de produse, astfel incat, astazi va ofera o gama larga de polieteri ai polivinilsiloxani care deservesc toate necesitatile medicilor dentisti indiferent de tehnica de amprentare preferata sau de situatia clinica ce trebuie rezolvata.

Express™ XT, material de amprenta polivinilsiloxan – Rezultate excelente de la prima amprentare

Odata cu lansarea siliconului de aditie Express™ XT, 3M ESPE va ofera mai multe solutii cu beneficii si caracteristici convingatoare. Avand la baza o formula avansata a vinilpolisiloxanilor, noul Express™ XT va da posibilitatea realizarii unei amprentari precise de prima data, fara compromisuri si implicit, de a obtine restaurari indirecte cu inchidere marginala perfecta. Realizat atat pentru tehnica de amprentare in doi timpi (tehnica de spalare) cat si pentru cea intr-un singur timp (monofazica) in dublu amestec, disponibil intr-o gama larga de viscozitati – de la chitos la fluid – Express™ XT este un material potrivit pentru orice tip de amprenta. Materialul de consistenta chitoasă Express™ XT este disponibil atat in cartuse Penta™ pentru malaxare si dozare automata cu ajutorul echipamentului Pentamix™ cat si in varianta de amestecare manuala. Materialele fluide – disponibile in doua variante: cu priza normala si cu priza rapida – se amesteca si dozeaza cu ajutorul dispenserului Garant™.

Combinatie remarcabila a proprietatilor clinice relevante Dezvoltarea materialelor de amprenta vinilpolisiloxan Express™ XT s-a bazat pe examinarea atenta a proprietatilor clinice relevante ale materialelor de amprenta care asigura obtinerea rezultatelor precise, de incredere – chiar in cazul situatiilor clinice dificile.

Ideal atat pentru medicii dentisti cat si pentru tehnicienii dentari Materialele de amprenta polivinilsiloxan Express™ XT sunt excelente pentru obtinerea amprentelor de mare fidelitate si a restaurarilor indirecte corecte, cu adaptare marginala perfecta – beneficii majore pentru medicii dentisti, tehnicienii dentari si



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

pacienti. Evaluările interne au confirmat faptul ca materialele Express™ XT redau cu fidelitate zonele importante ale campului protetic iar proprietatile lor clinice sunt extraordinar de bine armonizate. comparativ cu cele ale alpor siliconi de aditie.

Ghid pentru folosirea materialelor de amprenta 3M ESPE Express™ XT de consistenta chitoasa si fluida.

Combinatie remarcabilă a proprietăților clinice relevante

Performante inalte din momentul amestecarii pana la obtinerea modelului

Scopul amprentarii il reprezinta obtinerea unei copii fidele a situatiei intraorale cu reproducerea exacta a detaliilor preparatiei – conditie absolute necesara pentru realizarea lucrarilor protetice cu inchidere marginala buna. Pentru a reda cu precizie toate detaliile preparatiei materialul de amprenta trebuie sa prezinte excelente proprietati de curgere si sa fie hidrofil in faza premergatoare prizei. Pentru a evita aparitia deformatiilor in momentul demulării materialul de amprenta trebuie sa fie elastic si sa prezinte rezistenta buna la deformare in timpul prizei. Materialul de amprenta Express™ XT prezinta toate aceste proprietati, permitand obtinerea unor amprente precise, de prima data, chiar si in cazul unor situatii clinice dificile.

Reproducerea exacta a detaliilor preparatie

Combinatie remarcabilă a proprietăților clinice relevante

Materialele de amprenta din gama Express™ XT prezinta proprietati clinice remarcabile: hidrofilie si proprietati de curgere superioare, rezistenta foarte buna pentru evitarea deformatiilor, revenire elastica buna dupa priza astfel incat se minimizeaza riscul aparitiei distorsiunilor la indepartarea amprentei din cavitatea orala a pacientului, stabilitate dimensionala mai buna decat a alginatelor si a siliconilor de condensare. Materialele de amprenta polivinilsiloxan Express™ XT sunt excelente pentru obtinerea amprentelor de mare fidelitate si a restaurarilor indirecte corecte, cu adaptare marginala perfecta – beneficii majore pentru medicii dentisti, tehnicienii dentari si pacienti



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aprecieri foarte bune din partea clinicienilor

In urma efectuării unor studii clinice, medicii dentisti care au testat materialul de amprenta Express™ XT au fost foarte multumiti de rezultatele obtinute si avut aprecieri pozitive la adresa proprietatilor acestui material.

Express™ XT – silicon de aditie pentru realizarea amprentelor de mare precizie

Reproducerea exacta a detaliilor preparatiei

Hidrofilie superioara si proprietati de curgere excelente

Pentru a obține restaurări indirecte perfecte, amprenta trebuie să reflecte corect situația intra-orală. Acest lucru se poate realiza doar dacă materialul de amprenta este hidrofil și prezintă excelente proprietăți de curgere. Datorită proprietăților sale, materialul de amprenta Express™ XT asigură reproducerea exactă a detaliilor chiar în condiții de umezeală crescută. Studiile efectuate prin măsurarea unghiului de contact au demonstrat hidrofilia superioară a materialului Express™ XT comparativ cu alți siliconi de aditie.

Unghiul de contact al siliconilor de aditie (în timpul prizei). Express™ XT prezintă cea mai mare viteză de scădere a unghiului de contact și în consecință hidrofilia cea mai mare comparativ cu ceilalți siliconi de aditie testați.

Sursa: Date interne 3M ESPE.

În plus, materialul fluid de corectare Express XT prezintă proprietăți de curgere excelente care asigură acoperirea perfectă și redarea precisă a tuturor detaliilor preparatiei.

Curgerea la nivelul dintelui și subgingival a materialelor fluide din gama Express™ XT: Express™ XT Light body (verde), Express XT™ Light body (mov).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ampretele nu se deformeaza in momentul indepartarii din cavitatea orala

Elasticitate si Rezistenta buna la deformare!

Pentru a evita deformarea ampretei atunci cand se indeparteaza din cavitatea orala a pacientului, materialul de amprenta nu trebuie sa fie doar foarte rezistent la rupere ci sa prezinte si o buna elasticitate care sa-i permita sa revina la forma initiala.

Materialele care prezinta aceste doua proprietati sunt recunoscute ca avand o rezistenta buna la deformare. Aceasta proprietate poate fi explicata cu usurinta prin comparatia cu un practicant de "bunjee jumping" care se bazeaza pe rezistenta franghiei sale. Aceasta trebuie sa se intinda, dar sa nu se rupa.

Comparand mai multi siliconi de aditie, se observa ca Express™ XT prezinta cea mai buna rezistenta la deformare. In practica, acest lucru se traduce prin faptul ca ampretele realizate cu Express™ XT se deformeaza mai putin decat cele realizate cu alti siliconi de aditie la indepartarea din cavitatea orala a pacientului.

Rezistenta la deformare a diferitelor tipuri de siliconi de aditie. Testele au fost facute utilizand materiale cu vascozitati comparabile si acelasi tip de priza (normala). Dupa cum se observa Express™ XT Light body prezinta proprietati superioarea celorlalte materiale de amprenta studiate.

Sursa: Date interne 3M ESPE.

Express™ XT – un singur material – 9 varietati.

Express XT este disponibil in 9 varietati cu vascozitati, culori si tip de priza diferite, potrivite atat pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp (monofazica) in dublu amestec cat si pentru cea in doi timpi (tehnica de spalare). Materialele sunt disponibile atat in varianta pentru amestecare manuala cat si in cea pentru amestecare automata.

Incercati acum Express™ XT !

Folosind materialele de amprenta din gama Express XT aveti posibilitatea sa beneficiati de toate avantajele oferite de acesta fara a fi nevoiti sa va schimbati tehnica de lucru preferata!

Prezentare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 x 250 ml pasta baza
- 1 x 250 ml pasta catalizator