



# Polieter Impregum Soft Medium Body

Pret:

**408,00 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

Impregum™ Soft – material de amprenta polieter pentru amestecare manuala care ofera toate beneficiile noii generatii de polieteri: acuratete deosebita, hidrofilie initiala excelenta, gust placut, rigiditate optima care permite indepartarea amprentei cu usurinta din cavitatea orala a pacientului si demularea usoara a modelelor. Impregum™ Soft este disponibil in trei consistente:

- Fluida
- Medie
- Vascoasa

si este indicat pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp cu o vascozitate (consistenta medie) sau cu doua vascozitati (consistenta vascoasa/fluida).

Materialul de amprenta Impregum™ stabileste standardele in ceea ce priveste acuratetea materialelor de amprenta

## Caracteristici si beneficii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Hidrofilie Initiala

- Permite reproducerea perfecta a detaliilor chiar intr-un mediu umed
- Excelent pentru amprentarea zonelor subgingivale

Tixotropic cu priza brusca

- Curge sub presiune, dar ramane vascos in lingura si in jurul preparatiei dupa incetarea presiunii.
- Caracteristica de a se intari brusc da timp suficient medicului pentru a pozitiona lingura, dupa care priza se face rapid ... in cateva secunde. Acest lucru reduce dramatic riscul aparitiei posibilelor distorsiuni.

## Indicatii

Amprente de mare precizie pentru:

- Coroane si punti
- Inlay-uri/Onlay-uri
- **Implante**
- Amprente functionale

## Tehnica de lucru

- Aplicati lungimi egale de pasta baza si catalizator pe pad-ul de amestecare.  
Folositi o spatula metalica rigida. Amestecarea prin intinderea materialului si ridicarea spatulei conduce la obtinerea unui amestec foarte omogen, fara bule de aer. Repetati procedura pana cand amestecul este omogen si are aceeasi culoare, dar nu mai mult de 45 secunde.
- Umpleti prima data seringa cu ajutorul dispozitivului de umplere si aplicati materialul in jurul preparatiei.
- Umpleti lingura de amprenta si inserati-o in gura pacientului.  
Dezinfectati amprenta conform instructiunilor.

## Prezentare

Impregum Soft Medium Body 31755 (pt. amestecare manuala) consistenta medie

- 2 x 120 ml pasta de baza



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- 2 x 15 ml pasta catalizator
- Pad de amestecare