



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gigasept AF Forte 5L



Pret:

725,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Gigasept AF forte este un preparat fara aldehida pentru dezinfectie si curatare intr-o singura etapa - **PRODUS CONCENTRAT**

Preparat pentru dezinfectie combinata si curatare pentru instrumentar chirurgical, endoscoape rigide si flexibile, masti de respirat, accesorii de anestezie.

- Corespunde ultimelor metode standardizate si standardelor europene, avand un spectru de actiune mai larg
- Tuberculoid, microbactericid;
- Activ timp de 7 zile;
- Parfum placut pentru ca este lipsit de aldehide;
- spectru larg compatibil cu endoscoapele flexibile.
- Potrivit pentru folosire in bai cu ultrasunete;
- Timpi de contact scurti, chiar si la incarcatura proteica mare, datorita compozitiei optime.

Gigasept AF Forte este un dezinfectant fara aldehide combinat cu agenti de curatare pentru procesarea endoscoapelor rigide si flexibile si a instrumentarului chirurgical.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Actiune microbiologica

Gigasept AF forte este eficient impotriva: bacteriilor (incl. M. terrae), fungilor, virusurilor capsulate (inclusiv HIV, HBV, HCV), rota virusurilor, papova virusurilor, adeno virusurilor, helicobater pylori, MRSA.

Instructiuni pentru aplicare:

-nu combinati cu procesari chimice bazate pe aldehide. Se prefera folosirea produselor fara aldehide.

-in afara de procesarea manuala a endoscoapelor si instrumentelor, dezinfectantul instrumentar Gigasept AF Forte este recomandat de asemenea si pentru preparate semi-automate sau automate complet care functioneaza prin procesare ciclica la temperatura incaperii.

Metode de aplicare:

-asigurati-va ca articolele procesate sunt direct acoperite cu solutie de lucru, fara goluri de aer. Atunci cand a expirat timpul de contact, clatit din abundenta cu apa avand calitatea solicitata de procedeul care urmeaza a fi efectuat cu aparatul/instrumentul respectiv.

-astfel se pot evita, printre altele interactiunile si efectele nedorite in timpul tratarilor manuale sau mecanice.

Avantajul folosirii dezinfectantului Gigasept AF Forte

-corespunde ultimelor metode standardizate si standardelor europene, avand spectru de actiune mai larg.

-tuberculocid, microbactericid

-activ timp de 7 zile

-parfum placut pentru ca este lipsit de aldehide

-potrivit pentru folosire in bai cu ultrasunete

-timp de contact scurti, chiar si la incarcatura proteica mare, datorita compozitiei optime

Dezinfectantul Gigasept Af Forte este un produs concentrat.

Prezentare: flacon 5000ml