




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Calcicur - pasta hidroxid de calciu 2.5gr

Pret:

198,00 lei TVA inclusa

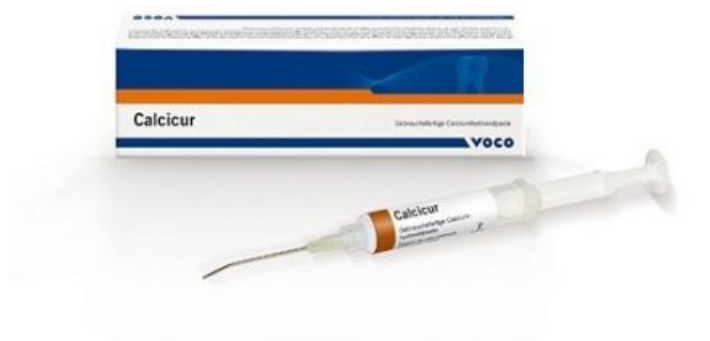

Descriere produs:

Compozitie:

Pasta de hidroxid de calciu pe baza apoasa, radiopaca.

Domeniu de aplicare:

Coafaj indirect pentru tratamentul cariei profunde .

Coafaj direct, cand pulpa dentara este deschisa sau in cazul pulpitelor avansate.

Captusirea cavitatii pentru a preveni expunerea la un mediu acid in cazul utilizării cimenturilor dentare.

Obturatii radiculare temporare in cazul in care cresterea radacinii nu este definitiva.

Aplicare:

Curatati si uscati cavitatea inaintea aplicării pastei de Calcicur care se aseaza in straturi subțiri pana cand se atinge grosimea dorita. Fiecare strat depus trebuie uscat cu atenție prin expunerea la aer.

Nu aplicati pasta de CALCICUR pe marginile cavitatii, iar cantitatea restanta se indeparteaza cu grija. Se poate trece apoi la executarea obturatie. In cazul obturatiilor radiculare mai intai se prepara si se curata canalul (cu apa oxigenata 3% sol. de hipoclorit de sodiu), apoi se introduce pasta de CALCICUR in canalul radicular cu un instrument adecvat (Lentullo). Evitati supraincercarea apicala cu material si pătrunderea



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

aerului, apoi executati obturatia. Este de preferat a se verifica obturatia de canal cu ajutorul unei radiografii. Refaceti obturatia de canal daca a trecut un interval mai mare de 6-8 luni.

Masuri de precautie:

Depozitarea improprie poate cauza uscarea sau separarea pastei.

Daca materialul sub forma de pasta are consistenta prea groasa in capsula de protectie i se poate reface functia de protectie adăugand 1-2 picături de apa distilata .

Hidroxidul de calciu ataca pielea si mucoasele.

A se evita contactul cu ochii.

Nu folosipi hidroxidul de calciu pe substantele dure dentare, care servesc ca legătura cu materialele dentare.

Nu aplicati CALCICUR daca sunt carii restante in dentina sau ca material definitiv de obturatie sau sigilare.

Depozitare:

Imediat după folosire seringă trebuie protejată cu un capacel.

In cazul aplicării directe canula trebuie curată și sterilizată.

A nu se folosi pasta întărită.

A nu se depozita sub 8 gr. C.

A nu se folosi după data expirării.

Prezentare:

seringa de 2 ml (contine 45% hidroxid de calciu)