



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Vertise Flow

**Pret:**

**179,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Primul compozit fluid auto-gravant si auto-adeziv.  
O noua categorie revolutionara a aparut in clasa compozitelor.

### **Beneficii**

- Procedura simpla si rapida.
- Reduce sensibilitatea post-operatorie.
- Control usor al umiditatii.
- Reduce sansa pentru erori umane datorate protocolului pentru sistemul adeziv.
- Aplicare rapida in cazul pacientilor cu probleme.
- O mai placuta experienta pentru pacient .
- Produs benefic pentru tratamentul pedodontic comparativ cu glass-ionomerii sau sigilantii
- Vertise Flow reduce numarul de etapele procedurale, comparativ cu utilizarea unui sistem adeziv intr-un singur pas cu un compozit fluid traditional.

### **Mod de aplicare**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- - 1) Aplicati Vertise Flow in cavitate prin intermediul varfului aplicator.
  - 2) Aplicati cu pensula un strat subtire de Vertise Flow pe toti peretii cavitatii si zona bizotata
  - 3) Fotopolimerizati 20 de secunde
  - 4) Construiti restaurarea in continuare cu Vertise Flow in straturi cu grosimea de 2mm sau mai putin.
  - 5) Fotopolimerizati fiecare strat 20 de secunde.
  - 6) Finisati si lustruiti.

## **Prezentare**

- 1 x seringa 2g
- nuante: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL, Translucent