



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Ana Etching Gel demineralizant 2 ml

**Pret:**

**23,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

### **Clasa / categoria**

Substante demineralizante

### **Scurta prezentare**

Ana Etching gel contine 37% acid fosforic si prezinta o fluiditate optima.  
Se poate aplica cu precizie pe marginile de smalt.

### **Continut:**

37% acid fosforic in apa, 4,7 % silicon dioxid.

1 seringa x 2 ml

### **Indicatii**

gravarea substantei dentare - prin tehnica de demineralizare a smaltului sau tehnica de demineralizare totala (smalt si dentina).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Mod de folosire**

### *Tehnica:*

1. prepararea cavitatii cu conservarea substantei dentare. Pentru protectia pulpei, urmariti instructiunile materialelor respective.

### *Demineralizarea smaltului*

2. Aplicati gelul demineralizant numai pe marginile de smalt. Lasati sa actioneze 30 sec.
3. Spalati cu apa timp de 20 sec.
4. Uscati cu atentie.

### *Demineralizarea totala*

2. Mai intai aplicati gelul doar pe marginile de smalt.
3. Dupa 15-20 sec, intindeti-l in toata cavitataea. Lasati inca 5- 10 sec.
4. Spalati cavitataea timp de 20 sec cu apa.
5. Uscati.

Dupa demineralizare trebuie aplicat un adeziv.

### *Note aditionale:*

- Poate arde sau irita tesuturile. Evitati contactul cu ochii, pielea, mucoase.
- In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti imediat sfatul medicului oftalmolog.
- Evitati contactul cu gingia sau cu dintii adiacenti.
- E folosit strict in scop stomatologic.

## **Modalitati de stocare / Garantie**

Termenul de garantie este de 3 ani la o temperatura 25 grade C.