



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Chloraxid 2% 200gr



Pret:

23,21 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lichid pentru clatirea si dezinfectarea canalelor

Substanta activa: hipoclorit de sodiu (2% clor activ)

Prezentare: sticla 200 ml

Chloraxid 2% are un efect litic in interactiune cu tesutul mort sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Chloraxid 2% are proprietati purgative si lucreaza prin albirea tesutului dur al dintelui.

Aplicarea si proprietatile Chloraxid:

- In timpul largirii mecanice a canalului indeparteaza pulpa moarta care ramane in urma.
- Curata canalul si indeparteaza stratul alunecos pentru a expune dentina din canalul radicular inainte de obturatie canalului.
- Previne petele dentare care ar putea surveni dupa obturatiea unui canal care n-a fost clatit.
- Recomandat pentru clatirea canalelor afectate de inflamarea pulpei.

Instructiuni pentru utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Introduceti Chloraxid in canal utilizand o seringa care are acul plasat in asa fel incat debitul este directionat pe peretele canalului. Este recomandat a se folosi un ac cu taietura pe suprafata laterala de langa varf.

Folosirea dispozitivelor sonice si ultrasonice si a pieselor contraunghi este permisa simultan in timpul lucrului la canal.

Hipocloritul de sodiu continut in produs inactiveaza imediat in contact cu substanta organica. Odata cu scaderea concentratiei de hipoclorit de sodiu este necesar marirea timpului de clatire si marirea cantitatii de solutie utilizata.