




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit matrici dr. Walser 10 buc + pensa

Pret:

1.250,00 lei TVA inclusa

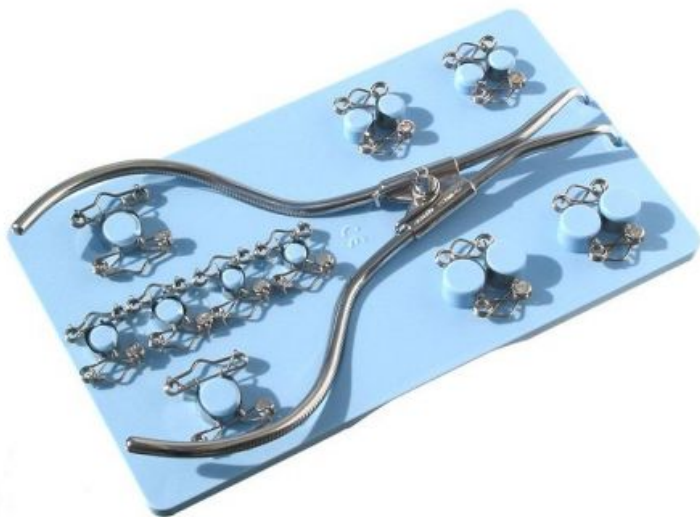

Descriere produs:

Matricile Walser se caracterizeaza printr-o adaptabilitate optima datorita aplicarii dintr-o singura miscare. Matricile Walser necesita rareori fixarea lor cu pene deoarece acestea se fixeaza foarte bine pe dinte, fiind foarte subtiri (doar 0,05 mm). Pacientul poate chiar musca atunci cand matricea este fixata pe dinte.

Avantaje:

- se fixeaza si se scoate in cateva secunde
- o obturatie optima intr-un timp f.scurt si dintr-o singura miscare
- fixeaza sigur si solid ca un corset
- se adapteaza automat la forma conica a dintilor
- pacientul poate inchide gura si musca
- fara insurubare si strangere
- suportul ideal pentru rulouri
- sterilizare simpla si utilizare indelungata
- foarte subtiri, numai 0,05 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Forme si zone de aplicare

Video aplicare forma X

Forma X

- Obturatii pe doua suprafete interdentare

Forma O (circulara)

Video aplicare forma O

- Obturatii MOD
- Obturatii pe dinti individuali

Aplicarea si inlaturarea matricilor WALSER

Forma X

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Inserati matricea in spatiul intrdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

Inlaturarea matricii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Retensionati matricea in punctul maxim. Acest pas este important pentru a nu deteriora obturatia bine conturata. Inainte de a o inlatura, matricea trebuie deplasata cu o miscare usoara de balansare in jurul axei sagitale, in acest fel benzile se vor indeparta mai usor de materialul de obturatie.

Forma O

Aplicare

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Inserati matricea in spatiul interdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

Matricea WALSER este aplicata imediat si este fixata strans si sigura ca un corset.

Inlaturare: similar ca la forma X

Forme

No. Forma Caracteristici speciale Inaltimea benzii Aplicabilitate
1 X potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm
BICUS 2 X 6,5 mm BICUS 3 X 5,0 mm MOLAR 4 X 6,5 mm MOLAR 5 O potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm
BICUS SMALL 6 O 6,5 mm BICUS SMALL 6c NEW O o parte a benzii cu 3 mm mai lunga
5/8 mm BICUS 7 O potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm BICUS 8 O 6,5 mm BICUS 9 O 5,0 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

MOLAR 10 O 6,5 mm MOLAR 10c NEW O o parte a benzii cu 3 mm mai lunga 5/8 mm MOLAR 11 XF banda are o despicatora la capat 6,5 mm 11, 12, 21, 22 12 XF

14 X 6,5 mm 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42

15 O 8,0 mm 11, 12, 21, 22 13 X benzi metalice extra scurte/ potrivit si pentru molari de lapte 5,0 m 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 14 X benzi metalice extra scurte 6,5 mm 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 15 O 5,0 mm 31, 32, 41, 42 16 O 6,5 mm 31, 32, 41, 42 17 X benzi metalice extra inalte 8,0 mm 4-5 18 X 8,0 mm 6-8 19 O 8,0 mm 4 - 5

20 O 8,0 mm 8-Jun 21 OF banda are o despicatora spre capat 8,0 mm 11, 21 22 OF

8,0 mm 12, 22 23 ON benzi metalice mai lungi, intindere a lor mai mare 5,0 mm 6-8 24 ON se ataseaza peste clema de diga 6,5 mm 5 - 9 25 O marime medie

(Forma speciala pentru molarii de lapte; deasemenea foarte potrivite nr.. 1, 5, 7, 13) 5,0 mm Molar de minte V

Prezentare

Kitul contine 10 matrici, de la nr 1 la nr 10 (fara 6c si 10c) astfel avand 4 matrici cu forma X si 6 matrici cu forma O cu doua inaltimi ale benzii. Matricile sunt montate pe un suport autoclavabil si indeplinesc toate cerintele care ar putea aparea in zona de molari si premolari. Include deasemenea si o pensa pentru plasarea matricilor.