



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Sistem taiat si finisat Do-All Proxicut Tor Vm

Pret:

**360,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Set Proxicut System:

- Suport Proxicut cu cheie = 1 buc
- Mâner = 1 buc
- Benzi diamantate Proxicut ( grosier ) = 12 buc
- Benzi diamantate Proxicut ( medii ) = 12 buc
- Benzi diamantate Proxicut ( fine ) = 12 buc
- Pânze de ferăstrău Proxicut = 12 buc

Do all Proxicut este un sistem de benzi de restaurare care este proiectat pentru a obține o ajustare excelentă a contactului proximal și o așezare marginală completă a coroanelor, fațetelor, inlay-urilor/onlay-urilor și conturarea proximală a obturațiilor compozite cu acuratețe, cu timp și efort minim. Proxicut IPR



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

(InterProximalReduction) face ca îndepărtarea smalțului interproximal să fie sigură și precisă, fără a crea colțuri ascuțite sau margini subgingivale.

Sistem conceput pentru utilizarea și cu tratamente ortodontice. Benzile flexibile se pot curba și se pot conforma conturilor naturale ale dinților pentru a maximiza confortul și siguranța pacientului.

Proxicut vine cu o bandă de margine a dintelui de ferăstrău (lamă) pentru tăiere și o bandă cu suprafața abrazivă ondulată pentru curățarea dintre spațiul interdental și lustruirea suprafeței dintre dinți.

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Introduceți suportul în orificiul unei lame sau unei benzi și îndoiți lama/banda în jurul ambelor brațe ale suportului
2. Introduceți degetul opus al suportului în al doilea orificiu al lamei/benzii și strângeți lama/benzii rotind mânerul cu șurub al suportului.
3. Când instrumentul este gata, puteți îndepărta excesul de material prin mișcarea de balansare a lamei/benzii în spațiul inter-proximal. Toate părțile sistemului sunt realizate dintr-un oțel inoxidabil chirurgical de înaltă calitate. Avantaje: • Designul ergonomic cu o singură mână oferă control tactil optim și reduce oboseala mâinii. • Elimina necesitatea de a tine instrumente mici și de a folosi instrumente rotative sau folii articulate. • Deschidere centrală pentru percepție vizuală îmbunătățită și acces pentru instrumente. • Designul prietenos cu pacientul previne iritarea tesuturilor moi. • Benzile flexibile se conformează conturilor naturale ale dinților pentru a evita crearea colțurilor ascuțite. • Autoclavabil și reutilizabil. • Nu va îndepărta smalțul excesiv. • Economisește timpul pe scaun. • Eficient pentru zonele anterioare și posterioare. **CUM SE OPERA CU DO-ALL PROXICUT HOLDER № 1.369:** Rotiți șurubul 1 pentru a apropia brațele suportului do-all proxicut pentru a face distanța dintre marginile exterioare ale brațelor suportului egală cu lungimea pânzei de ferăstrău № 1.384 sau a benzii de diamant № 1.385. Introduceți pânda de ferăstrău № 1.384 sau banda diamantată № 1.385 în clemele 2 ale brațelor suport și strângeți clemele cu cheia 3.

#### Mod de utilizare :

1. Rotiți mânerul șurubului 1 pentru a apropia picioarele suportului do-all proxicut, astfel încât distanța dintre părțile exterioare ale picioarelor suportului să devină egală cu lungimea lamei
2. Introduceți lama (banda) în clemele 2 ale picioarelor suportului și strângeți clemele cu cheia 3.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

3. Rotiți mânerul șurubului 1 pentru a strânge lama (banda) între picioarele suportului.

4. Fixarea suport-mâner

5. Suportul Do-all Proxicut poate fi, de asemenea, operat fără mâner sau fixat într-o piesă de mână de tip EVE, oferind mișcare înainte și înapoi.