



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Piesa Contraunghi Push Button

**Pret:**

**504,90 lei TVA inclusa**



## **Descriere produs:**

Piesă contraunghi cu Push Button.

Se conectează la orice micromotor pneumatic.

A nu se conecta la micromotor electric! Micromotorul electric poate livra până la 40.000 rpm, ceea ce poate dauna ireversibil acestei piese contraunghi!

Instrucțiuni de utilizare

### **1. Montarea frezei:**

Este necesară deschiderea pensei de blocare. Introduceți freza de blocare, asigurându-vă că poziția capatului frezei se cuplează cu orificiul tip D din tub.

### **2. Lubrifiere:**

Este necesar utilizarea sprayului după fiecare utilizare și înainte de autoclavare. Se agită recipientul de 3/4 ori pentru a se amesteca lubrifiantul și propulsorul. Introduceți duza de pulverizare și pulverizați pentru aproximativ 2-3 secunde până când uleiul iese din orificiile piesei de mână.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **3. Sterilizare:**

Este recomandată autoclavarea cu abur.

Autoclavarea se poate realiza până la 135 grade Celsius.

20 minute - 121 grade Celsius

15 minute - 132 grade Celsius

Mod de prezentare:

- 1x Piesă contraunghi cu push-button