

Pivoti endodontici metalici Nordin

Pret:

29,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pivoti cilindrici metalici auriti cu cap pentru cheie de pivoti in cruce.

Mod de folosire a pivotilor

Utilizati o freza corespunzatoare marimii pivotului pe care intentionati sa il folositi. Canalul radicular trebuie sa fie largit cu freza reamer si adancit la dimensiunea dorita. Trebuie evitata miscarea excentrica a frezei.

Folosind cheia de pivoti, pivotul trebuie insurubat in radacina pentru a verifica lungimea canalului. Dupa ce

ati facut acest lucru indepartati prin desurubare pivotul.

Dupa curatarea si uscarea canalului radicular si a pivotului, pivotul este inmuiaat in ciment si insurubat. Un pivot insurubat in canalele medial si distal ofera o buna ancorare. Pivotii endodontici va ofera aceasta posibilitate datorita variatiei in marime disponibile.

Prezentare

- cutie cu 12 buc
- marime selectabila din lista