



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

GIP-SOLV 1000gr



Pret:

32,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Destinația produsului

Gip Solv este destinat curățării plăcilor de proteză acrilică și a aparatelor ortodontice de reziduurile de ipsos.

Utilizarea sa elimină necesitatea îndepărtării mecanice a reziduurilor de gips.

Mod de utilizare

Pentru a îndepărta reziduurile de gips, puneți suprafața curățată în lichid și lăsați timp de 24 de ore; după acest timp, se spală bine sub jet de apă.

Precauții

Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și protecție pentru față atunci când lucrați cu preparatul. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă. Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. **ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă, solicitați asistență medicală.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Nu utilizați dispozitivul dacă sunt observate semne de deteriorare. Data de expirare nu se modifică după deschidere, cu condiția de a se închide ermetic după fiecare utilizare.

Conditii de pastrare

A se pastra la loc uscat, in recipientul original bine inchis, pana la 25°C. A se proteja de umiditate.

Compozitie

Citrat trisodic, acid citric.

Prezentare

Sticla HDPE - contine 1 kg produs.