



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

IZOL-GIPS 1000g



Pret:

35,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Destinația produsului

Izol-gips este destinat suprafețelor de matriță de gips separate de masa de metacrilat.

Preparatul filmogen este utilizat pentru izolarea acrilicului de ipsos.

Preparatul nu conține formaldehidă; are efect bacteriostatic.

Permite separarea ușoară a matrițelor de gips după polimerizare.

Creează o peliculă foarte subțire și netedă, care garantează fidelitate maximă.

Poate fi folosit pentru a izola gipsul din rășini acrilice.

Mod de utilizare

Forma de gips trebuie clătită bine cu un jet de apă clocotită pentru a îndepărta complet resturile de ceară de model. Această curățare trebuie făcută cu mare atenție, deoarece depinde de ușurința de împrăștiere a preparatului de separare și de aderența corespunzătoare a acestuia la suprafața matriței.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Turnați gips izolat într-un vas mic și utilizați o perie moale pentru a acoperi suprafața formei de gips încălzită anterior la 40 ° C. După câteva minute, aplicați din nou stratul de ipsos. După uscare, puteți începe să formați aluatul metacrilic.

Atenție! Peria care a fost folosită pentru acoperirea matritei nu trebuie scufundată direct în sticla cu izolat de gips sau reziduul nu trebuie scurs pentru a nu contamina preparatul și a evita gelificarea acestuia în ambalaj.

Precauții

Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și protecție pentru față atunci când lucrați cu preparatul. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă. Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/asistența medicului. **ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă, solicitați asistență medicală.

Nu utilizați dispozitivul dacă sunt observate semne de deteriorare. Data de expirare nu se modifică după deschidere, cu condiția de a se închide ermetic după fiecare utilizare.

Compoziție

Alginat de sodiu, colorant E124

Prezentare

Flacon 1000g