



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant freze Dentasept rotativ 5L



Pret:

194,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

DENTASEPT SPECIAL ROTATIV - Dezinfectant puternic pentru instrumentarul rotativ

DETERGENT DEZINFECTANT PENTRU FREZE, INSTRUMENTE ROTATIVE ȘI DE CANAL,
ÎNAINTE DE STERILIZARE

- Soluție gata de utilizare
- Compatibil cu o gamă largă de materiale, nichel, titan, carbură de tungsten, aluminiu etc.
- Timp de contact începând cu 5 minute
- Proprietăți microbiologice excelente - eficacitate împotriva virusurilor capsulate(1)
- Poate fi utilizat într-un aparat de curățat cu ultrasunete

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Soluție gata de utilizare.

1. Turnați Dentasept Special Rotativ în rezervorul de imersie. Nu diluați.
2. Imersați complet instrumentele în soluție, acoperiți și lăsați la inmuiat. Respectați timpul minim de contact de 5 minute.
3. Scoateți instrumentele din soluție.

Clătiți riguros cu apă potabilă dispozitivele medicale tratate, pentru a elimina toate urmele de produs și de murdărie organică.

4. Uscați corespunzător instrumentele și pregătiți-le pentru sterilizare.

Înlocuiți soluția imediat ce este vizibil murdară și cel puțin o dată pe zi pentru a menține eficacitatea produsului.

PENTRU INFORMATII DE UTILIZARE SI CONTINUT, VA RUGAM CONSULTATI BROSURA ATASATA!

PREZENTARE

Dentasept rotativ - Bidon 1 x 5L