



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant baie ultrasunete Bossklein Ultra Bio 5L

Pret:

220,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Dezinfectant baie ultrasunete Bossklein Ultra Bio, 5L

Proiectat pentru pre-curățarea și decontaminarea instrumentelor din interiorul băii cu ultrasunete.

- Soluție enzimatică
- Raport de diluție de 3%
- Timp de contact de 15 minute
- Soluție de culoare galbenă
- Compatibilă cu o gamă largă de materiale

Curatorul cu ultrasunete Bossklein indeparteaza eficient resturile de pe instrumente, lasand suprafetele libere pentru dezinfectare si sterilizare.

O soluție de curățare concentrată cu un raport de diluție economic de numai 3% asigură o soluție excelentă



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

pentru utilizatorul final.

Formula unică enzimatică este ideală pentru curățarea eficientă a suprafețelor neînsuflețite, neporoase, a unei varietăți de instrumente medicale.

Dezinfectantul cu ultrasunete Bossklein nu este recomandat pentru materiale plastice și cauciucuri.

Proprietăți fizice

Lichid galben, miros ușor de alcool, pH 5,0-6,0

Clasificarea pericolelor și detalii

ONU: 1993, Grup de ambalare: III, Clasa: 3, Denumirea expedierii: Lichid inflamabil nos (Propan-2-ol), FP 27°C

Instrucțiunile de utilizare

Adăugați 30 ml ± 1 ml de concentrat la 970 ml de apă de la robinet în baia cu ultrasunete. (soluție 3%). Scufundați instrumentele asigurându-vă că toate suprafețele sunt acoperite de soluție, adăugați obiecte goale în așa fel încât aerul să iasă. Rulați aparatul de curățare cu ultrasunete pentru cel puțin 15 minute conform instrucțiunilor producătorului. După scufundare, scoateți instrumentele și clătiți-le bine înainte de sterilizarea terminală sau dezinfecția la nivel înalt. Pregătiți o soluție proaspătă zilnic sau mai devreme dacă soluția este foarte murdară. Numai pentru uz profesional.

Prezentare

Flacon 5L