



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Adeziv dual autogravant Connexio



Pret:

**688,80 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Connexio este un adeziv amelo-dentinar cu priza duala, autogravant, care creaza rapid si usor, o legatura puternica fata de substratul dur dentar. Avand ca umplutura nano-particule, Connexio este indicat pentru reconstituiri directe cu materiale compozite fotopolimerizabile, sau cu materiale cu priza duala si autopolimerizabile pentru reconstructii de bont. Sistemul adeziv Connexio este format din doua componente: adeziv autogravant dentinar/adeziv pentru smaltul dentar si activatorul pentru obtinerea prizei duale. Tolereaza umiditatea moderata si poate fi folosit cu materiale compozite cu activare foto, autopolimerizabile sau cu priza duala.

- Ideal de utilizat la cimentarea pivotilor pe canal cu Encore D/C MiniMix sau a orcarui compozit cu priza duala.
- Aveti siguranta polimerizarii complete si in zonele unde nu ajunge lumina.
- Scapati de grija demineralizarii pe canal si inlaturarea acidului de la acest nivel.

### Rezultatele testelor



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Tensile dentin bond strength: 39.3 MPa

Shear enamel bond strength: 24.5 MPa

Marginal enamel seal: 97%

Marginal dentinal seal: 99%

### **Instructiuni de utilizare:**

1. Preparati dintele. Indepartati excesul de umiditate cu un jet usor de aer. Nu uscati excesiv dentina.
2. Amestecati intr-un godeu cu ajutorul unui aplicator de bonding, o picatura din componenta A si o picatura din componenta B timp de 2 secunde - pentru a obtine adeziv cu activare duala. Adezivul autogravant Connexio, este un adeziv cu priza duala si de aceea trebuie aplicat imediat dupa mixare.
3. Aplicati adezivul intr-o grosime medie la nivelul smaltului si al dentinei si frecati usor pe toata suprafata preparata timp de 20 de secunde.
4. Uscati cu un jet usor de aer adezivul pentru cel putin 5 secunde (pas necesar pentru evaporarea solventului).
5. Polimerizarea:

A. Restaurari directe - Compozite fotopolimerizabile, cu priza duala sau autopolimerizabile. Adezivul trebuie polimerizabil cu lumina de culoare albastra (halogen sau LED ) timp de 10 secunde si aveti certitudinea ca se va polimeriza si acolo unde lumina nu patrunde: prin autopolimerizare.

B. Restaurari indirecte - Compozite fotopolimerizabile: Adezivul trebuie polimerizat cu lumina de culoare albastra (halogen sau LED ) timp de 10 secunde.

### **Compozite cu priza duala sau autopolimerizabile:**

Cand folositi materiale compozite cu priza duala sau autopolimerizabile (in special materiale compozite penru reconstructii de bonturi si cimentare de pivoti), Connexio asigura o adeziune excelenta in absenta fotoinitierii, prin reactia de autopolimerizare. In aceste cazuri, Connexio Self-Etch Bond poate fi polimerizat cu lumina de culoare albastra (halogen sau LED ) timp de 10 secunde, doar ca si un pas suplimentar.

### **F.A.Q.**

#### **Se poate folosi acidul demineralizant inaintea folosirii adezivului Connexio?**

Se poate folosi, si chiar indicam gravarea acida a smaltului cu un aplicator de bonding, cand se foloseste Connexio pentru restaurari directe cu materiale compozite pentru obtinerea celei mai bune adeziuni.

#### **Cum se pot cimenta Punctile de tipul Maryland ?**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Smaltul dentar trebuie tratat cu gel demineralizant, cand folositi Connexio.

### **Cum trebuie depozitat Connexio?**

Inchideti si strangeti foarte bine capacul adezivului dupa utilizare. Depozitati-l la temperaturi intre 4°C - 23°C (39°F - 73°F). Asteptati ca adezivul sa ajunga la temperatura camerei inaintea utilizarii. Nu expuneti Connexio la lumina soarelui sau la lumina unitului dentar.

### **Prezentare**

- Connexio 3ml. Componenta A & 3ml. Componenta B