



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## CLEARFIL SE BOND 2 Monodoza bond+primer

Pret:

14,99 lei TVA inclusa



### Descriere produs:

**RESTAURARE DIRECTĂ** Aplicați BOND și PRIMER în ordinea indicată pe ambalaj și apăsați ușor pentru a elimina excesul de material. Clătiți cu apă și uscați cu aer ușor timp de 5 secunde. Aplicați amestecul de BOND și CLEARFIL DC Activator. Fotopolimerizați compozitul.

**RESTAURARE INDIRECTĂ** Condiționează suprafața restaurărilor protetice urmând instrucțiunile de utilizare a materialului de restaurare.\* Aplicați PRIMER și lăsați timp de 20 de secunde. Nu clăti. Uscați cu un flux de aer ușor timp de 5 secunde. Aplicați amestecul de BOND și CLEARFIL DC Activator.\*\* Uscați cu un flux de aer ușor timp de 5 secunde. Fotopolimerizarea este opțională. Cimentați folosind un ciment de rășină adeziv.

\*Înainte de aplicarea PRIMER este o opțiune gravarea selectivă a emailului cu acid fosforic.  
\*\*Fotopolimerizarea este o opțiune gravarea selectivă a emailului cu acid fosforic.

### Prezentare

1 x 0.1ml Bond

1 x 0.1 ml Primer