



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pasta pentru devitalizare Pulp-X

Pret:

89,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pasta Pulp X se foloseste pentru devitalizarea pulpei fara arsenic. Actioneaza rapid si inlatura durerea . Modul de prezentare al pastei o face usor de aplicat

Pulp X este indicat in devitalizarea pulpei inainte de extirpare/amputare si pentru devitalizari reziduale dupa inlaturarea tesurilor pulpare nevitalice.

Proprietati/Caracteristici:

Pasta Pulp x fara arsenic devitalizeaza si mumifica pulpa cu un maxim de protectie si fara durere. Durerile cauzate de pulpite dispar la scurt timp dupa aplicarea Pulp X. Dupa aplicarea pastei imediat se obtureaza canalul cu material provizoriu.

Mod de folosire:

Pentru a devitaliza dintii definitivi, deschideti cavitatea pulpara si introduceti Pulp X fara a exercita presiune. Apoi cavitatea trebuie sigilata pentru a preveni iesirea pastei devitalizante sau pentru a preveni scurgerea paraformaldehidei. Cantitatea necesara depinde de conditiile locale.

Devitalizarea totala a pulpei se petrece dupa 3-5 zile in cele mai rare cazuri dupa 7 zile. Daca pacientul nu simte durere obturatia definitiva se poate efectua in 24-48 de ore de la administrarea pastei. Dupa devitalizarea si extirparea pulpei canalul se obtureaza definitiv.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

INDICATII

- Devitalizare pulpara;
- Devitalizare reziduala dupa indepartarea tesutului pulpar ne-vital.

AVANTAJE

- usor de aplicat, actioneaza rapid si fara durere.

MOD DE PREZENTARE

- Flacon 6 g.