



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Hidroxid de calciu Calciject

Pret:

20,19 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Metoda de ambalare la unidoza creata de Centrix si aplicarea hidroxidului de calciu la nivelul canalului radicular, ajuta la obtinerea unor rezultate superioare comparativ cu aplicarea prin metodele traditionale cum ar fi acele Lentulo.

Calciject are tensiunea superficial foarte mica si patrunde pe canal fara utilizarea acelor Lentulo.

Calciject, hidroxid de calciu cu granulatie foarte fina ambalat la unidoza cu vârful metalic, asigura aplicarea în canal si îl umple de la baza în sus.

pH-ul ridicat si puternicul efect bacteriostatic al pastei cu hidroxid de calciu pur, fac ca acest produs sa fie indicat in tratamentele temporare si intermediare ale canalelor radiculare.

- Fara mizerie si fara amestecare intre pudra si lichid.
- Injectare directa din unidoza la nivelul canalului.
- Ambalare la unidoza pentru cea mai inalta asepsie.
- Tot timpul proaspat.
- Varful NeedleTube de 20ga, care este usor de indoit, va permite accesul usor la nivelul canalului.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Nu aveti nevoie de ace Lentulo
- Sigilati Clciject cu Tempit la nivelul de acces in cavitate.
- Radioopac.
- Functioneaza cu pistoalele aplicatoare Centrix C-R® sau cu orice pistol pentru unidoze.

O obturatie de canal corecta cu hidroxid de calciu folosind Calciject.

O obturatie de canal incorecta cu hidroxid de calciu metodele clasice.

Instructiuni de folosire

Indepartati Calciject din ambalaj.

Introduceti Calciject in pistolul Centrix si ii indepartati capacul protector.

Indoiti varful dupa necesitati si testati intai pe un pad

Apasati pe pistol cu o presiune usoara si constanta, in timp ce introduceti materialul in preparatie.

Dupa terminarea manoperei aruncati doza de Calciject.

Prezentare

- 1x unidoza x 0.25 ml