



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ciment rasinic definitiv autogravant Absolute

Pret:

305,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

AbsoLute™ este un ciment definitiv, autogravant, autoadeziv si cu priza duala.

Acest ciment este conceput special pentru cimentarea definitiva a coroanelor, a puntilor, inlay-uri, onlay-uri si a dispozitivelor corono-radiculare, atat a celor prefabricate cat si a celor realizate de catre tehnicianul dentar.

Seringa automixanta va ofera avantajul plasarii cimentului diect in interiorul preparatiilor sau a lucrarilor protetice si elimina dezavantajul mixarii manuale.

AbsoLute™ este un material de tip pasta/pasta, care elibereaza fluor si nu necesita demineralizare, utilizarea primerului sau a bondingului. Este un material foarte usor de folosit si are o adeziune excelenta la marea majoritate a materialelor.

Cimentul este disponibil in doua nuante: Translucent si Opac. Este radioopac pentru o identificare usoara in cadrul radiografiilor dentare.

Beneficii

- Elimina pasul de conditionare a suprafetelor dentare prin: demineralizare, folosirea primerului sau a



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

bondingului.

- Adera de un numar foarte mare de materiale dentare.
- Radioopac.
- Excesul se indeparteaza foarte usor.
- Grosimea foarte mica a peliculei de ciment asigura etansare perfecta a lucrarii protetice.

Instructiuni de folosire

Pentru cimentarea: Coroanelor, Punctiilor, Inlay-urilor si Onlay-urilor.

Pregatirea preparatiei in vederea cimentarii:

1. Indepartati lucrarile provizorii si oricealta urma de ciment provizoriu.
2. Verificati adaptarea lucrarii definitive in raport cu preparatia protetica.
3. Curatati preparatia prin periaj profesional si spalare abundenta.
4. Indepartati toata apa de la nivelul preparatiei cu ajutorul spay-ului de aer pentru 3-5 secunde, fara a desica dentina.

Mixarea

1. Indepartati capacul seringii de ciment.
2. Extrudati o cantitate mica de ciment pe un pad, fara a folosi varful de mixare, pentru a va asigura ca cele 2 componente s-au egalizat.
3. Atasati un varf de mixare seringii de ciment si invartiti baza maro a varfului in sensul acelor de ceasornic pentru fixarea acestuia.
4. Apasati pistonul seringii pentru a realiza auromixarea cimentului.

Cimentarea

1. Aplicati cimentul in interiorul lucrarii protetice. Pentru Inlay-uri, este mai usor ca cimentul sa fie aplicat in interiorul preparatiei dentare.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

2. Inserati lucrarea protetica si indepartati excesul de ciment.
3. Fotopolimerizati pentru 20-30 de secunde sau asteptati ca cimentul sa faca priza prin autopolimerizare.

Pentru cimentarea pivotilor(Turnati sau Prefabricati, fie din metal sau alte materiale).

Pregatirea preparatiei in vederea cimentarii:

1. Preparati spatiul radicular dupa instructiunile producatorului. Demineralizarea si utilizarea sistemelor adezive amelo-dentinare nu este necesara.
2. Inserati pivotul pentru a va asigura ca acesta se adapteaza corespunzator preparatie.
3. Curatati si tratati pivotul dupa instructiunile producatorului.

Cimentarea:

1. Aplicati cimentul pe peretii canalului folosind ace endodontice, ace Lentulo sau conuri de hartie, si aplicati ciment si pe suprafata pivotului.
2. Inserati pivotul si indepartati excesul de ciment.
3. Fotopolimerizari pentru 20-30 de secunde si asteptati ca cimentul sa faca priza la nivelul canalului prin autopolimerizare.
4. Continuati cu procedura de reconstituire a bontului dentar.

Intrebari Frecvente

Q: Este nevoie de demineralizare sau de utilizarea sistemelor adezive amelo-dentinare cand se foloseste AbsoLute™ ?



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

R: Nu, AbsoLute™ este un ciment rasinic autogravant si autoadeziv si se economiseste astfel timp, prin reducerea pasilor clinici.

Q: In cate nuante este disponibil AbsoLute™ ?

R: AbsoLute™ este disponibil in doua nuante: Translucent si Opac.

Q: AbsoLute™ poate fi folosit cu pentru cimentarea mai multor tipuri de materiale dentare?

R: AbsoLute™ este special conceput pentru a adera de o multitudine de materiale dentare, incluzand metale, materiale compozite, ceramica sau amalgam.

Q: Ce cantitate de material se afla intr-o seringă de AbsoLute™ ?

R: O seringă de AbsoLute™ contine 8 grame de ciment rasinic.

Q: Care sunt indicatiile cimentului rasinic AbsoLute™ ?

R: AbsoLute™ este indicat pentru cimentarea coroanelor, puntilor, inlay-urilor, onlay-urilor si a pivotilor(atat prefabricati cat si realizati in cabinetul de tehnica dentara).

Q: AbsoLute™ elibereaza fluor?

R: Da, AbsoLute™ elibereaza fluor.

Prezentare

- O seriga duala (Baza/ Catalizator de 5grame)
- 15 varfuri automixante.