



## CTX Expose XF RED refill



**Pret:**

**178,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Cu Expose nu este nevoie nici de masurare, nici de mixare si nici sa folositi substante de indepartare a petelor, in caz de accidente!

Expose contine un colorant alimentar intr-o solutie de propilenglicol si actioneaza prin colorarea substantelor rezultate din metabolismul bacteriilor din leziunea carioasa. Prezinta o rata de rezultate fals pozitive/negative foarte mica, irelevanta clinic.

Exposé este un indicator de carie integrat intr-un aplicator si un sistem de dozare.

Solutia detectoare este pre-aplicata pe aplicatoarele Benda Micro.

Aplicati Exposé prin simpla atingere a unei suprafete dentare umede, si Exposé coloreaza dentina infectata.

Fara dozare, picaturi si mizerie. Exposé elimina seringile si alte metode care pot cauza pete.

- fara dozare, fara mizerie si fara contaminare incrucisata
- sustine stomatologia minim invaziva
- dispenserul poate fi folosit si la alte aplicatoare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- 1) Inlaturati un aplicator Exposé din BendaMatic
- 2) Umeziti putin aplicatorul Exposé ori cu apa ori cu saliva de pe un dinte umed
- 3) Aplicati aplicatorul umed Exposé pe preparatia dintelui.
- 4) Clatiti si examinati zona pentru orice urma ramasa de Exposé pe suprafata dentinara afectata
- 5) Continuati cu tratamentul

## **Prezentare**

- refill 100 buc indicatoare rosii extra-fine