




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Material punti provizorii Access Crown 50 ml

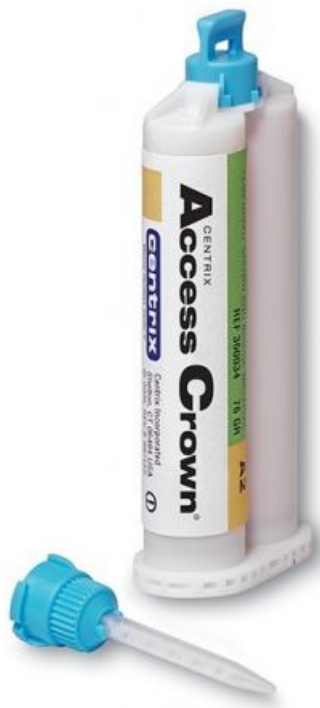

Pret:

**519,99 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Access Crown® ofera cele mai multe nuante si cel mai scurt timp de priza. Niciun material compozit temporar de tipul bys - acryl nu este mai usor de folosit. Dupa ce face priza are **elasticitate** si poate fi indepartat de pe campul protetic dupa doar un minut. Avantajul clinic major al unui material compozit de tipul bysacryl este **comportamentul elastic** al acestuia in timpul polimerizarii. Memoria elastica a lui Acces Crown permite **extragerea sa din zone retentive sau din cavitati neperalele si revenirea la forma sa originala.**

### Avantaje

- Manipulare ideala – face priza in cavitatea orala in doar 60 de secunde.
- Contractie de polimerizare mica, eliberare de caldura mica, rezistenta la compresie mare.
- Stabilitate a culorii crescuta, nu se pateaza, este radioopac.
- Rezista pana la 18 luni.
- Cele mai uzuale sapte nuante Vita, plus nuanta bleach. **FLUORESCENTA !!!**
- 40% mai putine pierderi datorita folosirii celor mai mici varfuri de mixare
- Fara MMA: nu are gust sau miros neplacut.
- Poate fi reparat cu compozit fluid
- Compatibil atat cu cimenturile cu eugenol cat si cu cele fara eugenol.
- Polishabilitate marita



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

#### Caracteristici tehnice

Rezistenta la compresiune.....	200 Mpa
Rezistenta la forte transversale .....	95 Mpa
Duritate Vickers.....	23
Factor de shrinkage la polimerizare.....	0.18%

#### Caz clinic **Instructiuni de folosire**

1. Amprentati campul protetic inainte de slefuire.
2. Injectati direct in amprenta pre-operativa, aplicati pe campul protetic si asteptati un minut.
3. Access Crown atinge in stadiu semi-elastic pentru a fi usor de indepartat.
4. Finisati cu accesorii pentru compozite si la nevoie reparati cu compozit lichid.
5. Auto-polimerizarea mai dureaza doar 2,5 minute.

#### Prezentare

Kitul contine: Un cartus cu 50ml / 76 grame plus 10 varfuri auto-mixante