



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Kit matrici dr. Walser 18 matrici

**Pret:**

**1.850,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Matricile Walser se caracterizeaza printr-o adaptabilitate optima datorita aplicarii dintr-o singura miscare. Matricile Walser necesita rareori fixarea lor cu pene deoarece acestea se fixeaza foarte bine pe dinte, fiind foarte subtiri (doar 0,05 mm). Pacientul poate chiar musca atunci cand matricea este fixata pe dinte.

### Avantaje:

- se fixeaza si se scoate in cateva secunde
- o obturatie optima intr-un timp f.scurt si dintr-o singura miscare
- fixeaza sigur si solid ca un corset
- se adapteaza automat la forma conica a dintilor
- pacientul poate inchide gura si musca
- fara insurubare si strangere
- suportul ideal pentru rulouri



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- sterilizare simpla si utilizare indelungata
- foarte subtiri, numai 0,05 mm

Forme si zone de aplicare

Video aplicare forma X

### **Forma X**

- Obturatii pe doua suprafete interdentare

### **Forma O (circulara)**

Video aplicare forma O

- Obturatii MOD
- Obturatii pe dinti individuali

Aplicarea si inlaturarea matricilor WALSER

### **Forma X**

**Aplicare**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Inserati matricea in spatiul intrdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

### **Inlaturarea matricii**

Retensionati matricea in punctul maxim. Acest pas este important pentru a nu deteriora obturatia bine conturata. Inainte de a o inlatura, matricea trebuie deplasata cu o miscare usoara de balansare in jurul axei sagitale, in acest fel benzile se vor indeparta mai usor de materialul de obturatie.

### **Forma O**

### **Aplicare**

Matricea Walser aleasa trebuie indreptata in directie ocluzala, si clestele trebuie aplicat din aceasta directie. Departati clestele Walser pana la punctul in care primele semne de pe varful clestelui intra in orificiile de pe lateralul matricii.

Inserati matricea in spatiul interdentar. Relaxati clestele atunci cand matricea ajunge la papila. Banda de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

metal va inconjura in acel moment dintele. Apoi plasati matricea dupa nevoie in directie ocluzala.

**Matricea WALSER este aplicata imediat si este fixata strans si sigura ca un corset.**

**Inlaturare: similar ca la forma X**

## Forme

No. Forma Caracteristici speciale Inaltimea benzii Aplicabilitate 1 X potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm BICUS 2 X 6,5 mm BICUS 3 X 5,0 mm MOLAR 4 X 6,5 mm MOLAR 5 O potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm BICUS SMALL 6 O 6,5 mm BICUS SMALL 6c NEW O o parte a benzii cu 3 mm mai lunga 5/8 mm BICUS 7 O potrivit si pentru molari de lapte 5,0 mm BICUS 8 O 6,5 mm BICUS 9 O 5,0 mm MOLAR 10 O 6,5 mm MOLAR 10c NEW O o parte a benzii cu 3 mm mai lunga 5/8 mm MOLAR 11 XF banda are o despicutura la capat 6,5 mm 11, 12, 21, 22 12 XF

14 X 6,5 mm 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42

15 O 8,0 mm 11, 12, 21, 22 13 X benzi metalice extra scurte/ potrivit si pentru molari de lapte 5,0 m 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 14 X benzi metalice extra scurte 6,5 mm 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 15 O 5,0 mm 31, 32, 41, 42 16 O 6,5 mm 31, 32, 41, 42 17 X benzi metalice extra inalte 8,0 mm 4-5 18 X 8,0 mm 6-8 19 O 8,0 mm 4 - 5

20 O 8,0 mm 8-Jun 21 OF banda are o despicutura spre capat 8,0 mm 11, 21 22 OF

8,0 mm 12, 22 23 ON benzi metalice mai lungi, intindere a lor mai mare 5,0 mm 6-8 24 ON se ataseaza peste clema de diga 6,5 mm 5 - 9 25 O marime medie

(Forma speciala pentru molarii de lapte; deasemenea foarte potrivite nr.. 1, 5, 7, 13) 5,0 mm Molar de minte V



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Prezentare**

Kitul contine 18 matrici, de la 1 la 18 , incluzand matricile pentru frontali 11 si 12 si matricile mai inalte, extra high X-shape , 17si 18 pentru cariile subgingivale. Matricile sunt montate pe tavita autoclavabila .

Kitul contine si clestele aplicator.