



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Fuji Plus pulbere 15g



**Pret:**

**359,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Ciment de cimentare ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină

Performantele remarcabile datorate combinării dintre o rășină și un ionomer de sticlă, și diferitelor culori disponibile fac din GC Fuji Plus un ciment cu indicații multiple care poate fi folosit pentru toate procedurile de cimentare moderne.

GC Fuji PLUS are un timp de lucru extins pentru cimentarea punșilor totale, a sistemelor speciale și a mai multor restaurări într-un singur timp.

### Caracteristici & Beneficii

- Amestecare și manevrare ușoare asemănătoare cimenturilor conventionale
- Proprietăți mecanice similare cimenturilor pe bază de rășină
- Adeziune intrinsecă la structura dentară pentru eliminarea tehnicilor adezive, care sunt complicate și sensibile la umiditate
- Adeziune bună la metal, rășini acrilice și ceramică silanizată și de aceea indicații multiple
- Grosime redusă a filmului pentru plasare ușoară și adaptare îmbunătățită
- Fără sensibilitate post-operatorie pentru confortul pacientului
- Solubilitate foarte scăzută pentru sigilare marginală susținută
- Radioopacitate ce facilitează diagnosticarea



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- In combinatie cu GC Fuji PLUS Conditioner sigilare marginală optimă
- Eliberare susținută de fluor

## **Indicatii**

GC Fuji PLUS este un ciment cu indicatii multiple, capabil să cimenteze restaurări cu suport metalic, inlay-uri ceramice, coroane și punți ceramice și cimentarea tuturor coroanelor acrilice/rășinice, inlay-urilor, onlay-urilor și punților.

## **Mod de folosire**

Curățați cu apă. Aplicați Fuji PLUS Conditioner, lăsați 20 secunde, clătiți cu apă și uscați. Nu desicați. Aplicați Fuji PLUS atât pe restaurare cât și pe dintele preparat, și începeți fixarea coroanei în 30 de secunde de la terminarea amestecării. Îndepărtați excesul de material la prima formare a stadiului de gel.

## **Ambalare**

- set complet A3 :
- 15 g pulbere
- 
-