



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Matrice de contur pentru frontali Proxy Pal

Pret:



305,66 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Matrice de contur pentru frontali

Forma perfect anatomica pentru inchiderea diastemei si pentru a evita "boala triunghiului negru "

- O singura matrice frontala pentru toate inchiderile diastema fara sa compromiti calitatea.
- O singura matrice pentru evitarea "triunghiul negru "
- O singura matrice frontala pentru toate formele proximale.

Indicatii

- Clasa IV
- Clasa III larg
- diastema (strungareata).



Aplicati matricea cu atentie astfel incat varful sa se insereze in cavitate.

Impingand / tragand banda, gasiti pozitia ideala pentru cea mai buna forma proximala.

Taiati matricea daca este nevoie.

Conturul special stabilizeaza matricea in timpul intregului proces.

Banda poate fi fixata permitandu-i sa mearga in jurul suprafetei palatinale si inapoi in spatiul interdental pe partea opusa. Aceasta tehnica poate fi utilizata cu o plombare dubla proximala.

Curbura progresiva ajuta la crearea plombelor incizale cu o forma anatomica corecta.

Curburile proximale difera de la dinte la dinte. In scopul atingerii unei obturatii perfecte, matricea a fost proiectata astfel incat curbura matricei sa escaladeze liniar pe intreaga sa lungime. La un capat curbura este subtire fiind ideala pentru incisivii maxilarului inferior. La celalalt capat curbura matricei este potrivita pentru inchiderea diastemei. Impingand / tragand matricea este usor sa gasesti o pozitie potrivita pentru fiecare dinte. Matricea are o margine cervicala care se insereaza in cavitatea tesutului moale. Marginea cervicala blocheaza umezeala din tesuturile inconjuratoare sa contamineze cavitatea si sa stabilizeze matricea in timpul insertiei materialului de obturatie. Indicatii de utilizare : Clasa IV, Clasa III larga , inchidere de diastema.

Instructiuni :

-Dupa prepararea cavitatii, aplicati cu grija matricea, astfel incat marginea cervicala sa mearga in cavitate.

-Aplicand miscari de impingere / tragere cautati pozitia ideala a benzii pentru cea mai buna pozitie .

-Taiati matricea deaca este necesar.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

-Conturul special stabilizeaza matricea in timpul intregului proces. Banda poate fi fixata permitandu-i sa mearga in jurul suprafetei palatinale si inapoi in spatiul interdental pe partea opusa. Aceasta tehnica poate fi utilizata cu plombare dubla proximala.

Prezentare

- 36 buc