



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant instrumentar ID Activ Bossklein



Pret:

110,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dezinfectant concentrat pentru instrumentar, freze si instrumentar endodontic.

Fara Aldehyde si phenol.

Mod de utilizare: 2% sau 4% soluție. Se adaugă 20 ml la 1 litru apă curată (2%). Timpul minim de înmuiere (2%): 5 minute (virucid, bactericide, sporicide), 15 minute (fungicide).

A nu se depăși timpul de înmuiere recomandat. După dezinfecție, clățiți cu atenție instrumentele cu apă distilată sau obtinuta prin osmoza inversa.

Se utilizează o soluție de 4% pentru instrumentele foarte murdare. Schimbati soluția săptămânal sau zilnic in functie de gradul de utilizare. In cazul în care murdăria fizică apare in solutie, schimbati solutia mai devreme. Nu folosiți pe materiale aliate, din fontă maleabilă sau piese turnate din aluminiu ex citoject seringă etc.

Pericol:

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P260 - Nu se va respira praful / fumul / gazul / ceața



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

/ vaporii / spray-ul. P264 - Se spală bine după manipulare. P273 - A se evita dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / feței. P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați / scoateți imediat toate hainele contaminate. Se clătește pielea cu apă / duș. P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este prezent și ușor de făcut. Continuați să clătiți. A nu se utiliza după data de expirare.

Spectru de eficiență & Expunerea în timp

Bacterial 15 min: Pseudomonas aeruginosa 15 min - Staphylococcus aureus 15 min - Enterococcus hirae 15 min - Salmonella typhimurium 5 min - Legionella pneumophila 5 min

Candida albicans 15min

Virusuri: HIV1 -5min ; Virusul gripal uman B- 2min ; Virusul hepatitei C -5min

Standarde de testare

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476.

Prezentare

Flacon 1L/ Bidon 5L