



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Dezinfectant suprafete Bosklein SD Activ 1L



Pret:

**55,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

#### **Spray Dezinfectant Suprafete pe baza de alcool**

Pentru curatarea suprafetelor non – invazive a dispozitivelor medicale. Special conceput pentru a fi folosit in mediul Medical si Stomatologic. Activare 60 secunde

### **Spectru de eficienta & Expunerea in timp**

- **Bactericid 60 sec:** Pseudomonas aeruginosa 60 sec - Enterococcus hirae 60 sec - Staphylococcus aureus 60 sec Salmonella typhimurium 60 sec - MRSA 60 sec - VRE 60 sec - E-coli 60 sec
- **Yeasticidal 60 sec:** Candida albicans 60 sec.
- **Spectru limitat Virucid 60 sec:** Adenovirus 60 sec - Norovirus 60 sec - Virus hepatitic B (HBV) 60 sec - Virus hepatitic C (HCV) 60 sec - Virus imunodeficientei umane (HIV) 60 sec - Virus leucemic uman HT Sec - virusul gripei (care include virusii umani, virusul gripei aviare și porcine de 60 sec) - virusul hepatitei Delta (HDV) 60 sec - coronavirusul (inclusiv SARS și MERS) 60 sec - Filoviridae (care include virusul Ebola) 60 sec - Sec - Virusul rujeolic 60 sec - Herpesviridae 60 sec -



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Flavivirus 60 sec - Virusul rabiei 60 sec - Poxviridae 60 sec

- **Fungicid 5 minute:** Aspergillus brasiliensis 5 min

### **Teste standard :**

BS EN14476 – BS EN13727 – BS EN14204 – BS EN13704 – BS EN13624

### **Mod de utilizare :**

Pulverizati suprafetele si obiectele care trebuie dezinfectate de la o distanta de cca 30 cm astfel incat acestea sa fie complet umezite si lasati asa, timp de mai mult de 30 secunde. Lasati sa se evapore sau stergeti cu un servetel curat.

### **Compozitie :**

Solutia contine printre alte ingrediente : Ethanol, Propan-2-ol, Polymeric biguanide hydrochloride, Disinfectants, Parfum, Linalool, Limonene.

### **Proprietati fizice:**

Lichid limpede, miros în funcție de aroma, pH 7,0-8,0. Punct de aprindere 23\_C foarte inflamabil. Perioada de valabilitate de 3 ani

### **Pericol:**

EUH208 - Conține polyaminopropyl-biguanide. Poate provoca o reacție alergică. H225 -Lichid și vapori foarte inflamabili. H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P210 - A se păstra departe de căldură / scânteii / flăcări deschise / suprafețe încinse. - Fumatul interzis. P261 - Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii . P280 - Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / feței. P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați / Îndepărtați imediat toate hainele contaminate . Se clătește pielea cu apă / duș. P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P403 + P233 + P235 - A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra recipientul închis ermetic. Pastrati-l rece. Nu folositi pe suprafete sensibile la alcool. A nu se utiliza după data de expirare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## **Prezentare**

Flacon 1L