


MTA Repair HP 2 doze

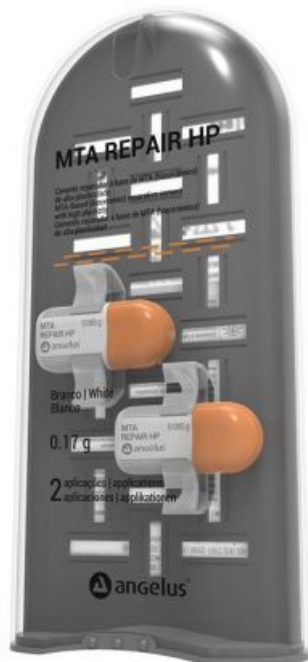

Pret:

150,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

MTA REPAIR HP

Ciment bioceramic reparativ

Indicatii :

- accidente si complicatii endodontice
- obturatii retrograde
- pulpectomii
- apexifiere

-ca baza inainte de obturatia de canal in cazul unui apex larg

Caracteristici :

- plasticitate ridicata
- fara bismuth oxide
- eliberare de ioni de calciu
- alcalinitate ridicata
- doze unice

Beneficii :

- nu exista risc de contaminare sau metale grele
- o mai buna manipulare si modalitate de insertie
- nu pateaza structura dentara
- induce biomineralizarea
- previne dezvoltarea bacteriilor
- optimizarea timpului de utilizare

Întrebări despre acest produs

Care sunt principalele proprietăți ale MTA HP REPAIR ?

Chimice:

- Eliberarea de ioni de Ca - permite formarea țesutului remineralizare.

- Puternic alcalin – nu permite dezvoltarea bacteriilor

Fizice:

- Solubilitate scăzută - pot fi utilizate în mod direct pe pulpă și țesuturi periapicale
rezistență la compresiune: 44,2 MPa - poate fi folosit ca material de bază
- Extindere prin hidratare - produce etanșare totală a cavităților
timp de setare: 15 minute - poate fi utilizat într-o singură sesiune
- Radioopacitate - permite monitorizarea cu raze X ulterioară (observație proactivă)

Biologice:

- Biocompatibilitate - poate fi utilizat direct pe țesuturile vii
 - Remineralizarea dentinei - formarea unei bariere biologice
 - Etanșare biologică a perforatiei - vindecarea completă a țesuturilor periradiculare

Care este diferența dintre MTA ANGELUS și MTA HP REPAIR?

- Diferența constă în înlocuirea apei distilate(MTA Angelus) printr-un lichid care conține apă și un alt plastifiant organic care conferă plasticitate ridicată a produsului(MTA HP REPAIR)
 - Înlocuirea radiopacifier-ului (de la Bismuth oxid la Calciuy Tungaste), asigurând absența decolorării dentare.

Care sunt indicațiile pentru MTA HP REPAIR ?

- Tratamentul perforațiilor de canal și a furcatilor radacinilor.
- Sigilarea resorbtilor interne.
- Material Retrofilling pentru operatiile paradontotice.
- Coafaj direct si pulpectomii.

- Apexifiere si apexigeneza.
- Sigilarea radacinilor inainte de tratamentul endodontic de albire.

Cum se aplica MTA HP REPAIR?

Acesta poate fi aplicat cu Aplicatorul de MTA Angelus.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

- Pachet cu 2 capsule pulbere, 0.85 grame fiecare si 2 flacoane lichid (apa + plastifiant organic)