



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

BIO MTA+ MINIKIT

Pret:

145,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

BIO MTA+ Mini - Biomaterial pentru obturarea si reconstructia canalelor radiculare – alb, 3 x 0,14 g BIO MTA+ praf, 1 ml lichid

BIO MTA+ este recomandat in special pentru urmatoarele cazuri:

- Perforatii ale peretelui canalului radicular
- Resorbtiile la nivelul canalului radicular
- Obturarea retrograda a apexului
- Coafaj pulpar
- Amputatie pulpara
- Tratamentul dintilor cu dezvoltare radiculara incompleta

Bio MTA+ nu este potrivit ca unic material de obturare a canalului.

Caracteristici

- Durata de aplicare – 4 minute.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Durata de polimerizare – 2 h dupa aplicare.
- Permite tratamentul intr-o sedinta.
- Remineralizeaza tesutul dentar si sustine regenerarea tesuturilor.
- Este compus din nanoparticule.
- Contine hidroxiapatita, component natural al osului.
- Este perfect biocompatibil.
- Este exceptional de plastic, motiv pentru care se aplica optim in cavitati cu forma neregulata si nu sunt necesare unelte complicate pentru aplicarea acestuia.
- Are o durabilitate de 3 ori mai mare in comparatie cu materialele MTA clasice.

Ingrediente:

Bio MTA+ praf: oxid de calciu, hidroxiapatita, oxizi de: silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, magneziu, zirconiu; fosfat de calciu.

Bio MTA+ lichid: apa purificata Ph Eur, catalizator de calciu.

Prezentare

- 3 x 0,14 g BIO MTA+ praf, 1 ml lichid

Mod de utilizare

1. Taiati varful recipientului de lichid de Bio MTA+.
2. Amestecati intregul continut al unui flacon de praf Bio MTA+ cu una, doua picaturi de lichid pe o placuta de amestecare.
3. Amestecati pentru aproximativ 30 de secunde pana cand amestecul capata o consistenta de plastilina moale. Daca amestecul este prea gros au prea grunjos, adaugati inca o picatura de lichid Bio MTA+.
4. Daca amestecul este prea gros au prea grunjos, adaugati inca o picatura de lichid Bio MTA+.
ATENTIE! Amestecati praful Bio MTA+ doar cu lichidul Bio MTA+. Nu inlocuiti lichidul cu apa sau alte produse!
5. Plasati amestecul in locul dorit cu un aplicator. Un flacon de praf Bio MTA+ contine o doza de unica folosinta.
6. Odata mixate componentele, consumati amestecul in maxim 4 minute. Preparatul se va intari ulterior.