



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit colorat Rainbow Flow 1g

Pret:

65,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Fiecare seringa vine in pachet cu gama de culori si cu insigne autoadezive pentru pacientii cuminti, adica pentru toti pacientii!

Compozitul fotopolimerizabil fluid Rainbow Flow este destinat copiilor si nu numai. Are o contractie la polimerizare scazuta si este foarte dur. Este disponibil in 6 culori vii si vesele, alese de catre cei mai tineri dintre pacienti.

Aplicatii

Compozitul fotopolimerizabil fluid Rainbow Flow este utilizabil in urmatoarele situatii clinice:

- obturatii ale dintilor de lapte si permanenti
- sigilarea santurilor si fosetelor
- marcarea orificiilor radiculare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ingrediente

- Rasini metacrilice (bis-GMA, UDMA ,TGDMA), umplutura de nanoparticule anorganice, pigmenti, initiator foto, inhibitor

Metoda de aplicare

- Scufundati aplicatorul in etanol inainte de utilizare, apoi montati-l la seringa flow colorat..
- Sigilarea santurilor si fosetelor:
- Preparati si demineralizati defectul / santurile / fosetele (ex. cu Blue Etch), apoi clatiti si uscati. Utilizati bonding. Aplicati un strat de composit de aproximativ 2 milimetri si fotopolimerizati cu lampa timp de 10 – 15 secunde. Adaugati mai mult composit daca este necesar si fotopolimerizati din nou..
-
- **Marcarea orificiilor radiculare:**

Aplicati dupa obturarea permanenta a canalului radicular. Aplicati un strat de composit de aproximativ 2 milimetri la intrarea in canal si fotopolimerizati cu lampa timp de 10 – 15 secunde. Culoarea diferita a compozitului va ajuta sa localizati cu usurinta intrarea in canal in cazul tratamentelor ulterioare.

Retrageti pistonul seringii si sigilati ambalajul cu capacul original imediat dupa fiecare utilizare pentru a evita polimerizarea produsului in interior.

Produsul este destinat uzului repetat. Aplicatoarele sunt de unica folosinta. Re-utilizarea aplicatoarelor implica risc de infectie.

Prezentare

- seringa 1g