



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dezinfectant amprente Eurosept Plus



Pret:

145,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Pentru dezinfectarea tuturor materialelor de amprenta dentara.

Puneti amprenta in cauza in solutia dezinfectanta gata de utilizare si indepartati-o din nou dupa timpul de expunere recomandat. Amprenta trebuie acoperita complet cu solutia. Scufundati alginatii si hidrocoloizii doar pentru scurt timp si lasati sa se usuce, apoi clatiti amprenta cu apa.

Nu amestecati cu agenti de curatare sau alti dezinfectanti. In functie de gradul de contaminare, solutia de lucru trebuie reinnoita (recomandare RKI: cel putin in fiecare zi lucratoare). Solutia de lucru poate fi eliminata prin apa uzata.

Timpi de expunere:

Bacteriile (inclusiv MRSA) conform VAH, EN 13727, EN 14561 (sarcina mare): concentrat 1 min.;

Levurozid (Candida albicans) conform VAH, EN 13624, EN 14562 (expunere mare): conc. 1 min.;

Virucid limitat (virusuri incapsulate de exemplu HBV, HIV, HCV) conform RKI/DVV (cu expunere): concentratie 1 min.;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

TbB (M. terrae in testul suspensiei, sarcina mica): conc. 15 min.;

Virusi Noro conform EN 14476 (sarcina mica): concentratie 30 min.;

Virusi rotativi conform BGA/DVV (contaminare scazuta): Concentratie 1 min. Informatii de siguranta:
Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.

A se evita eliberarea in mediu. Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/regionale/nationale/internationale.

Regulamentul 648/2004/CE: Contine 5% surfactanti cationici, parfum.

Compozitie: 100 g de solutie contine 0,24 g clorura de benzil-alchil-C12-16-dimetilamoniu, 0,24 g clorura de N,N-didecil-N,N-dimetilamoniu, 0,24 g C12-14-alchil[(etilfenil)metil] -clorura de amoniu, 0,35 g clorhexidina gluconat.

Prezentare

Bidon 5L