



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Solutie concentrata curatat amprente Eurosept Xtra Tray



Pret:

100,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Concentrat lichid pentru curatare amprente, paduri de amestecare si instrumente dentare. Formula inovatoare ofera performante de curatare foarte bune datorita retetei usor alcaline si este delicata cu materialele in acelasi timp.

EuroSept Xtra Tray Cleaner Concentrate este potrivit pentru curatarea tuturor metalelor rezistente la corozie, precum si a materialelor sensibile, cum ar fi aluminiul anodizat. De asemenea, ideal pentru utilizarea intr-o baie cu ultrasunete.

Pregatiti solutia de aplicare diluand cu apa adecvata, in conformitate cu ghidurile nationale. Curatati aproximativ in prealabil tavile de amprenta si instrumentele murdare si, in functie de gradul de contaminare, puneti-le intr-o solutie de aplicare 5 - 10% (50 pana la 100 ml de concentrat de curatare la 1 litru de solutie de aplicare) timp de cateva ore/peste noapte. Apoi indepartati cu atentie toate particulele de murdarie ramase sau incomplet indepartate din tavile de amprenta si instrumente folosind apa si o perie adecvata. Continuati sa reprocessati instrumentele dupa o clatire temeinica. Solutia de aplicare trebuie schimbata imediat daca se murdareste vizibil, dar cel tarziu in fiecare zi. Conform Regulamentului UE privind Dispozitivele Medicale, utilizatorii/pacientii sunt obligati sa raporteze orice incidente grave aparute in legatura cu acest produs catre producator si autoritatile competente din statul membru UE in care este stabilit



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

utilizatorul/pacientul. Conform Directivei UE 93/42/EEC pentru dispozitive medicale.

Numai pentru uz profesional de catre personal cu expertiza adecvata, in conformitate cu orientarile nationale.

Miros neutru.

Nota: Aplicarea nu este recomandata pentru urmatoarele materiale: alama si cupru.

Nota: acizi sulfonici, C14-17-sec-alcan, sare de sodiu. Provoaca leziuni oculare grave. Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/protectie pentru ochi/protectie pentru fata.

Prezentare

Flacon 1L