



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

RubyCal hidroxid de calciu cu iodoform

Pret:

42,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Detalii suplimentare

Material pentru obturatia temporara si tratarea canalelor radiculare, sub forma de pasta.

Avantaje:

imbunatateste reconstructia tesuturilor periapicale distruse

asigura crearea rapida a dentinei recesive si reparative

efect antibacterian de lunga durata si stimularea crearii barierelor mineralizate

efect sicativ, cu un rol important in cazurile de exudate inflamatorii persistente

Specificatii:

Dresing temporar pentru canale, folosit intre vizite



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Tratamentul canalelor radiculare infectate

Efect antibacterian

Amelioreaza efectul inflamatoriu

Stimuleaza reconstruirea tesuturilor periapicale distruse in timp ce stimuleaza odontoblastul pentru a crea dentina reparatorie

Protejeaza pulpa de stimulii termoelectrice

Previne penetrarea exudatului in canalele radiculare

RubyCal este un material moale, care nu se intareste, iar eliberarea controlata si de lunga durata a ionilor de calciu incepe imediat dupa plasarea in canal

Instructiuni de folosire:

produsul are o consistenta cremoasa ajutand la aplicarea usoara in canal cu ajutorul unui varf aplicator – acul lentullo sau ultimul ac folosit pentru largirea canalului.

RubyCal este folosit dupa prepararea si uscarea canalului.

Introduceti aplicatorul pana la 1/3 din deschiderea apexului

Apasati pistonul seringii pana cand pasta ajunge la apex, deschizand si retragand usor seringa

Indepartati excesul de pasta utilizand un pad steril.

Pasta ar trebui lasata in canal pana la reconstruirea partiala a osului.

RubyCal contine iodoform, care mareste efectul sicativ si antibacterian in canal. Are, deasemenea, un efect de antivirucid si antifungicid. Recomandat in principal a fi folosit in canale infectate.

Prezentare: 1 x seringa 2g