




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ace Reciproc One Reci B5 Micro-Mega sterile

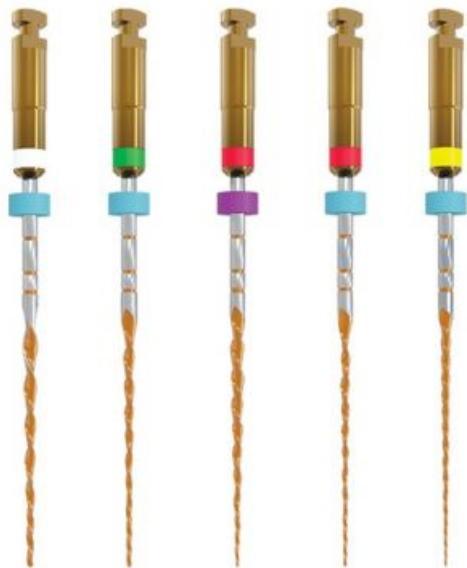

Pret:

298,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ace One Reci pentru prepararea canalelor radiculare, concepute pentru utilizare în mișcare de reciprocare.
Blister cu ace presterilizate.

Eficiență de tăiere: secțiune transversală asimetrică, patentată.

Siguranță: rezistență la oboseală ciclică

Flexibilitate: respectarea anatomiei canalului radicular datorită tratamentului termic C.Wire

Minim invaziv: conservarea zonei peri-cervicale și a țesuturilor dure dentare

VITEZĂ DE ROTAȚIE

300 - 400 rpm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

CUPLU MAXIM

4 N.cm

UNGHIURI DE RECIPROCITATE

170/60

Intrebari/raspunsuri:

Pot folosi One RECI cu motorul meu actual?

One RECI a fost dezvoltat pentru a funcționa cu unghiuri între 170°/60°. Coltene detine brevet privind utilizarea acelor in acest interval.

Dacă puteți seta aceste unghiuri pe motorul curent, puteți utiliza acele cu motorul. Dacă nu puteți seta unghiurile motorului curent în consecință, vă recomandăm să achiziționați MicroMega Dual Move sau CanalPro Jeni pentru a obține performanța scontată. Dacă motorul dvs permite și setarea turatiei și torque-ului, puteți folosi aceste valori maxime (400 rpm - 4 N.cm).

Pentru performanțe optime, Coltene recomandă utilizarea Coltene „MicroMega Dual Move” sau „CanalPro Jeni”.

MicroMega One RECI poate fi recalibrat după un singur pacient? MicroMega One RECI poate fi recalibrat în general?

MicroMega One RECI este un instrument de unică folosință. Nu refolosiți acul. Dacă faceți acest lucru, există riscul de a ii reduce performanța și caracteristicile de securitate (de exemplu, fractura instrumentului în dinte sau contaminarea încrucișată). Consultați instrucțiunile de utilizare.

De ce este prezentat MicroMega One RECI ca instrument individual, în timp ce protocolul din instrucțiunile de utilizare recomandă utilizarea One Flare și One G înainte?

Aceasta precizare se referă doar la etapa de modelare. Utilizarea One Flare și One G este recomandată în funcție de caz și de alegerea medicului dentist.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
