



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit matrici cervicale celuloid TorVM

Pret:

18,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kit-ul de matrici transparente cervicale 1141 TOR VM contine:

Matrici transparente cervicale, 50 microni, 10 x 37 mm, 100 bucati

Dispozitiv fixare matrice cervicala

Opritor pentru dispozitiul de fixare.

Mod de utilizare kit matrici cervicale 1141 TOR VM:

1. Rulati cu atentie (fara indoire) banda de matrice transparenta cervicala 1, introduceti banda de matrice 1 in dispozitivul de fixare 2 (cuprinde un tub metalic cu diametrul interior de 6 mm).
2. Reglati lungimea partii extinse a matricei 1 in functie de dimensiunea danturii, taiati marginile matricei cervicale pentru a-i da forma dupa cea a dintelui.
3. Fixati matricea cervicala 1 in dispozitivul de fixare 2 cu ajutorul opritorului 3.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

4. Realizati restaurarea tinand dispozitivul de fixare 2 cu o singura mana.

Prezentare

100 buc + dispozitiv fixare